

More control,
less stress.



Evolution[®] Duodenal

CONTROLLED-RELEASE STENT - UNCOVERED

More control, less stress.

留置直後のステント位置

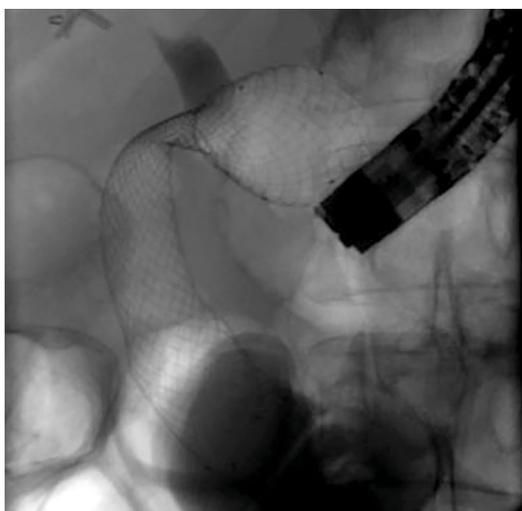


Image courtesy of Prof. Horst Neuhaus,
Evangelisches Krankenhaus Medizinische Klinik,
Düsseldorf



Evolution ステントのニチノールワイヤを編み込んだ構造は適度なラジアルフォースと柔軟性を提供します。

Evolutionary Stent

患者に安定した治療を柔軟に行うために、ステントは重要な役割を担います。

両端のフランジ構造により
ステント移動（マイグレーション）
のリスクを軽減




Image courtesy of Dr. Mario Traina,
IsMeTT, Palermo, Italy

視認性の高い黄色の内視鏡／透視用
マーカにより容易にステントの近位
端を確認できるため、正確な位置決
めの実現をサポート

Flexor デリバリーシステムはキック
を低減すると同時に、複雑な解剖
学的構造でも優れたプッシュビリ
ティを発揮

ステントの近位端のコイル構造は
シースの柔軟性へ貢献

制御力の高いリリース - トリガ
を引くたびに等量分のステント
を展開または再収納

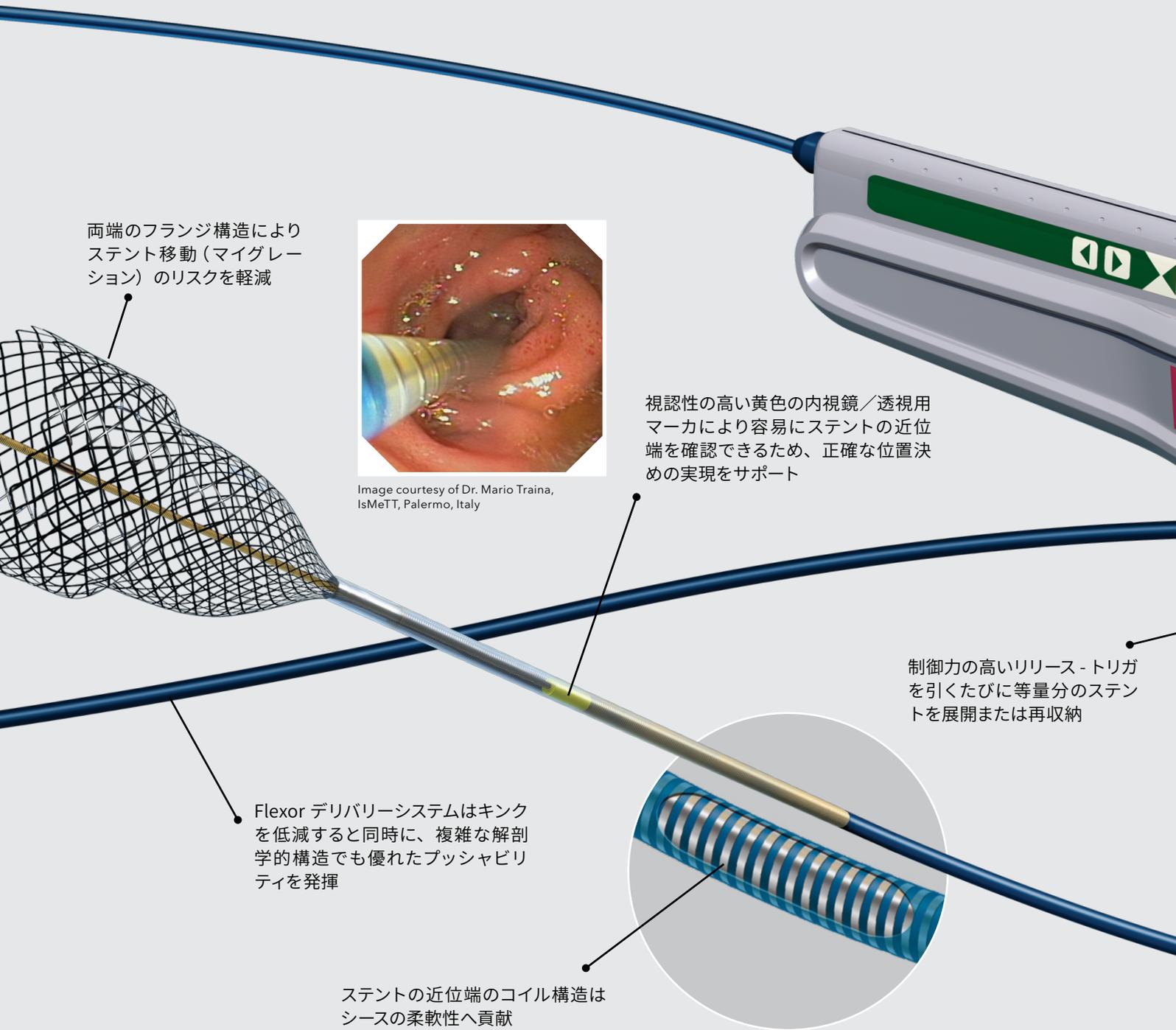

Evolutionary Control

使いやすく、制御力の高いリリースシステムにより、等量分の展開と再収納を安定して行うことができます。このメカニズムにより、ステントのジャンプを最小限に抑え、ステントを正確な位置に留置できます。

ステント収納ができなくなる
ポイントを示す復帰限界
点マーク


ステントをハンドルにしっかりと固定する
セーフティワイヤがステントの再収
納性を実現

ステントの展開と再収納を簡単
に切り替える方向ボタン



Evolutionary Security


Evolution Controlled-Release ステントは優れた制御力と操作性により、留置後のリスクを軽減しながら胃十二指腸壁に圧着します。これにより、悪性狭窄にも、悪性腫瘍による胃流出路閉塞にも、胃十二指腸の自然なカーブに適合した留置を実現します。

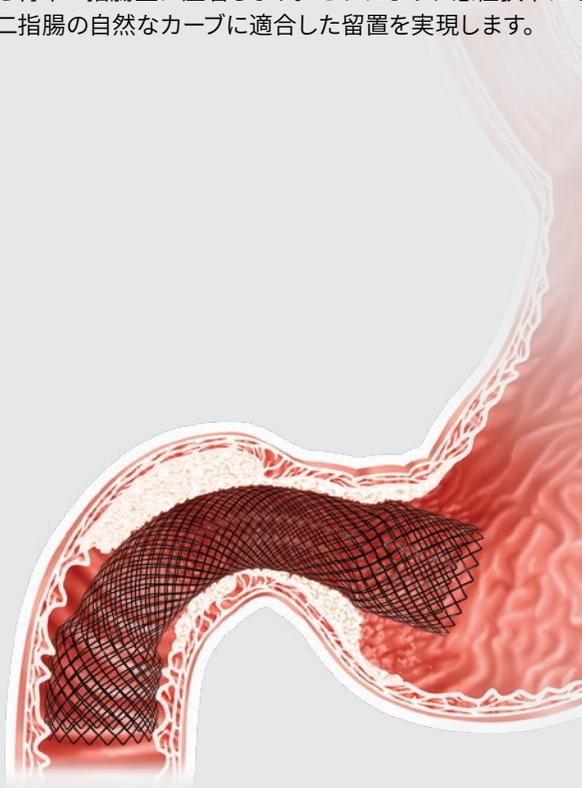

ステント留置前の狭窄部



留置直後のステント位置

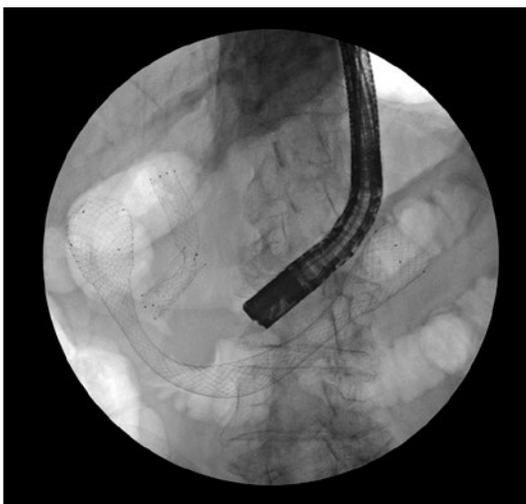

留置 2 週間後のステント位置



Product Specifications

本品は悪性腫瘍による胃・十二指腸の閉塞および狭窄に対する、姑息的治療に使用します。
滅菌済み、単回使用のディスポーザブル製品です。

グローバル 製品番号	カタログ番号	ステント 本体径 mm	ステント フランジ径 mm	ステント長 cm	デリバリー システム Fr	デリバリー システム 有効長 cm
G48025	EVO-22-27-6-D	22	27	6	10	230
G48026	EVO-22-27-9-D	22	27	9	10	230
G48027	EVO-22-27-12-D	22	27	12	10	230

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

