

Provide
sustainable patency.



Resonance®

メタリック尿管ステント

Use a stent that resists compression.

Resonance® メタリック尿管ステントはコイル状に巻いたワイヤ構造により、開存性の維持に貢献します。

Keep urine flowing.

ステントが強い管外性圧迫を受ける状況でも、尿のドレナージが可能です。



Replace the stent infrequently.

ステントは最長 12 ヶ月間留置でき、交換頻度を減らすことが期待できます。

Resonance[®]メタリック尿管ステントは、
「従来の標準的なポリマ製ステントに
代わり、上部尿路閉塞症の管理に
使用できる製品」です¹。


耐圧性のあるステント

Resonance メタリック尿管ステントは MP35N 合金からなり、長軸方向の柔軟性を損なうことなく、ラディアル方向の強度を有します。In vitro 試験では、COOK 社従来のポリマ製ステントに比べて管外性圧迫に対しより高い耐圧性を有することが確認されています²。

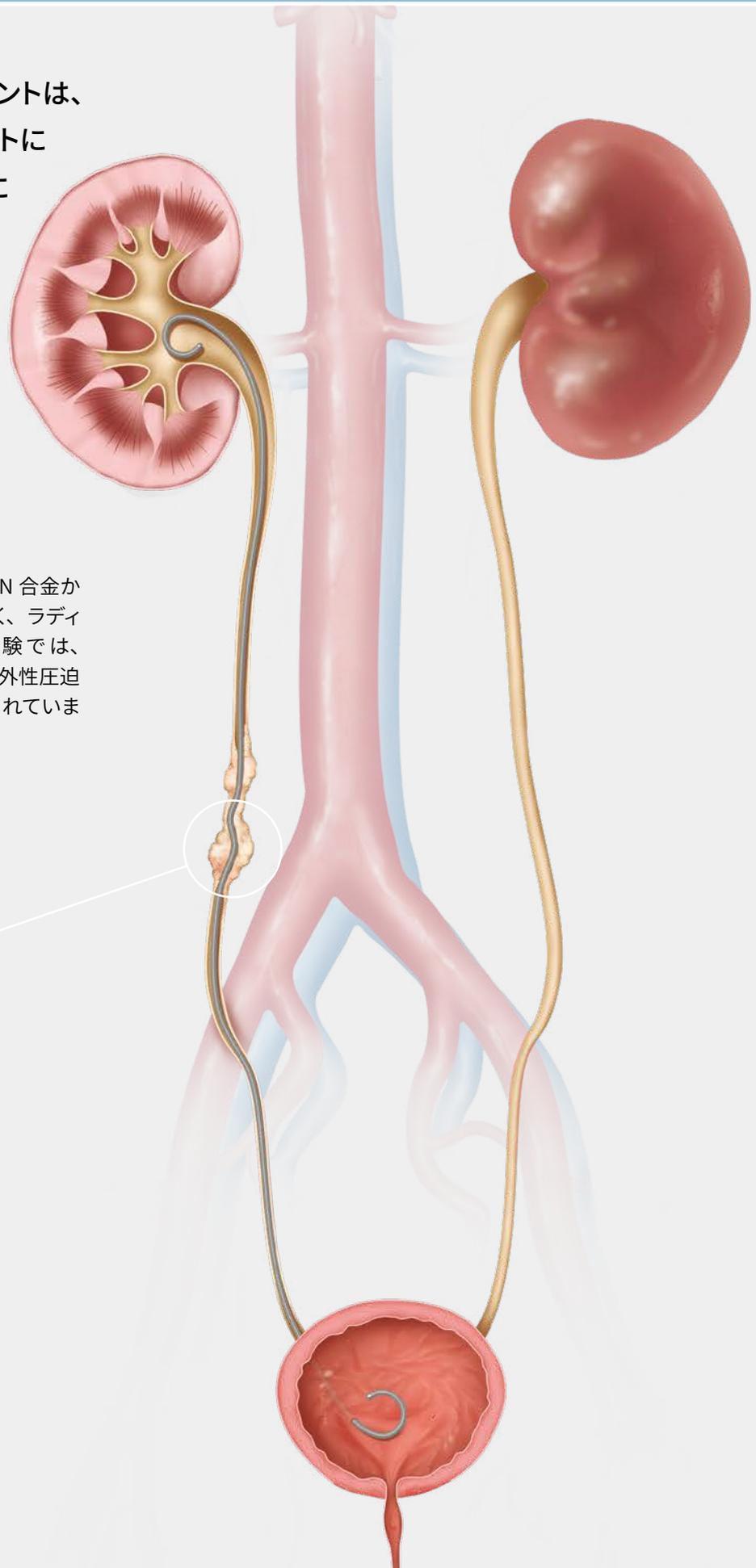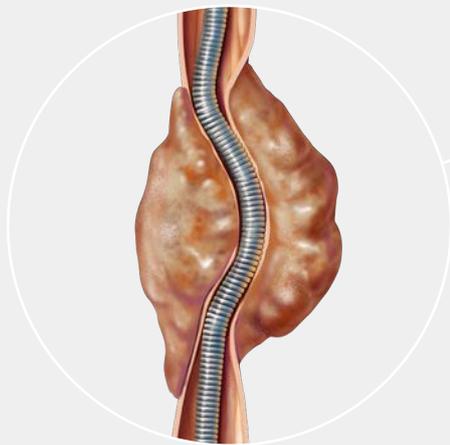

尿流を維持

ポリマ製ステントは側孔からドレナージしますが、Resonance®には側孔がなく、しっかり巻いたコイルの間隙から尿がステント内を通り、またステント外にしみ出ることによって持続的にドレナージが可能です。

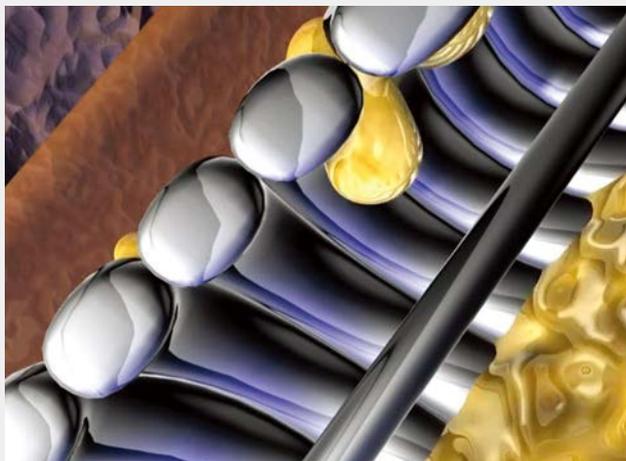

ステントの留置と抜去

ラディアル方向強度とドレナージメカニズムにより、Resonance メタリック尿管ステントは最長 12 カ月間の留置が可能です。頻回の交換が不要になることが期待できます。Resonance メタリック尿管ステントは順行性または逆行性のいずれの方法でも留置できます。シース内を通して同軸上にステントを挿入します。抜去する際は従来の膀胱鏡手技により鉗子または把持器を使用します。

ポジショニングシステム (イントロデューサ)

シースおよびステントポジショナ (プッシャ) は高い視認性を備え、腎盂側・膀胱側のピッグテイルの留置位置を示します。



Courtesy of Dr. Tze Wah

条件付 MRI 適合 (3 テスラまで)

指定した MR 環境下で既知の危険性がなく、電子化された添付文書に記載した撮像条件等で MR 検査を実施可能です。

1 López-Huertas HL, Polcari AJ, Acosta-Miranda A, et al. Metallic ureteral stents: a cost-effective method of managing benign upper tract obstruction. J Endourol. 2010;24(3):483-485.

2 Polcari AJ, Hugen CM, López-Huertas HL, Turk TM. Cost analysis and clinical applicability of the Resonance Metallic Ureteral Stent. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2010;10(1):11-15.



Resonance®

メタリック尿管ステント

Resonance® メタリック尿管ステントは、外因性の狭窄を考慮して設計されています。耐圧性が高く最大 12 ヶ月間留置することが可能なため、ステント交換の頻度を減らすことが期待されます。強い外圧下でも、しっかりと巻かれた金属製コイルが開存性を保ち、尿を持続的に排出します。

Resonance は、シースを挿入し、膀胱鏡を用いて抜去します。

グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ (cm)
ステントおよびイントロデューサ (ポジショニングシステム) のみ			
G34108	RMS-060020-R	6.0	20
G34109	RMS-060022-R	6.0	22
G34110	RMS-060024-R	6.0	24
G34111	RMS-060026-R	6.0	26
G34112	RMS-060028-R	6.0	28
G34176	RMS-060030-R	6.0	30

販売名：COOK Resonance 尿管ステントセット
承認番号：22600BZX00119000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

