



Secure difficult airways
in seconds.

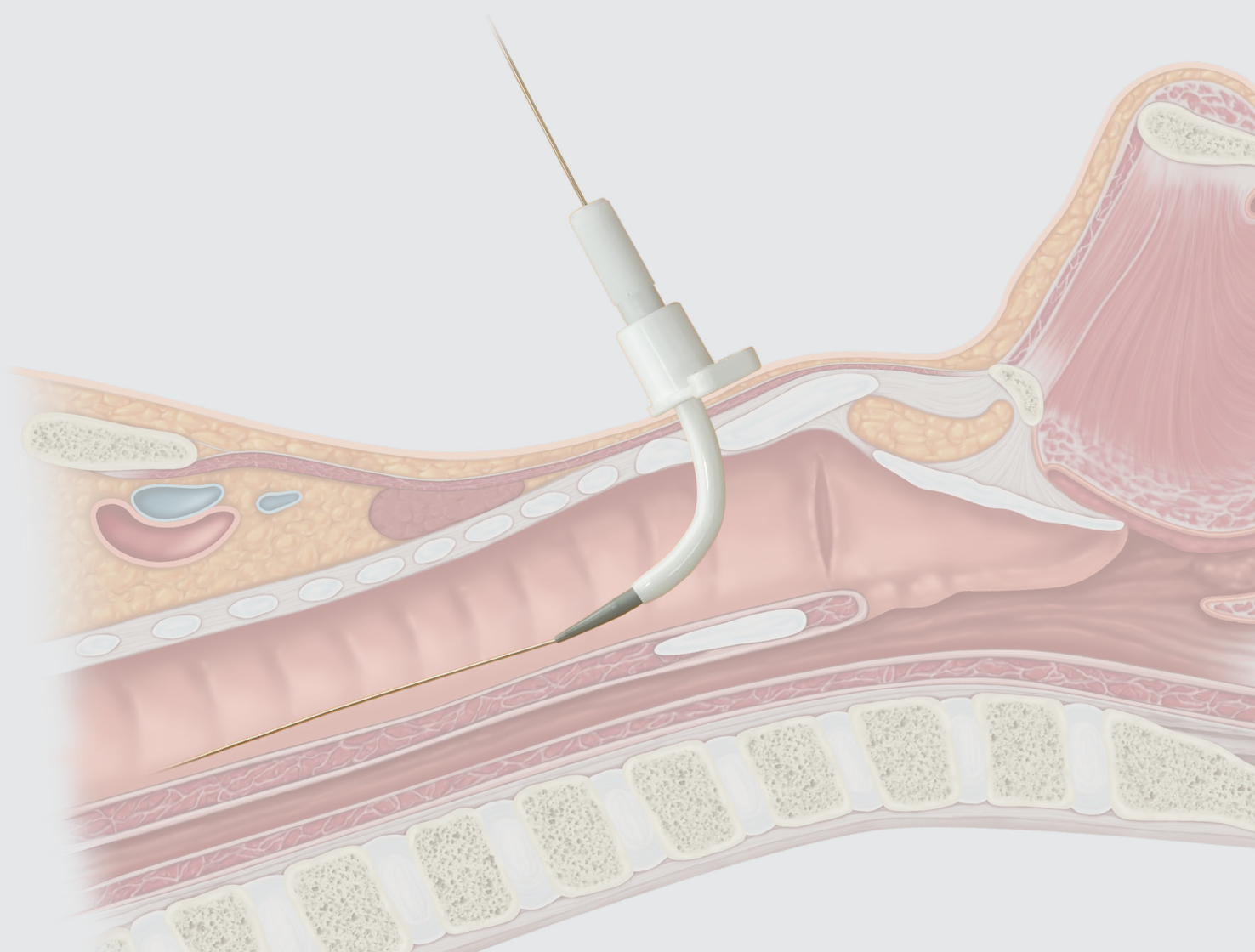

Melker

緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルセット


Melker 緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルセットは、気管内チューブの挿入ができない場合などの緊急気道確保に使用します。*

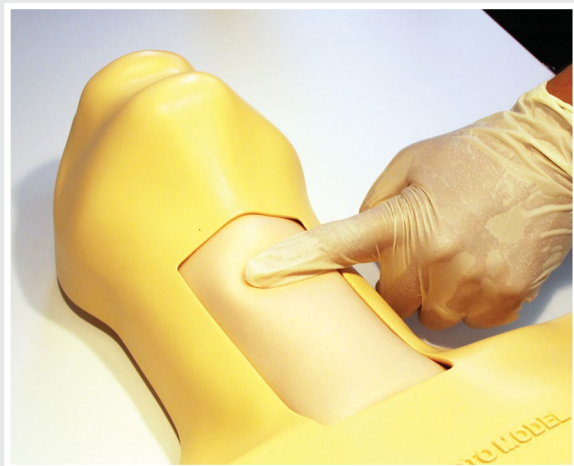

Step 1：輪状甲状膜の位置を確認します。




Step 2：尖刀（スカルペル）を用いて、輪状甲状膜をダイレータと気道チューブ（輪状甲状膜切開用カテーテル）が挿入しやすいよう正中線に沿って、縦に1～2 cm 切開します。

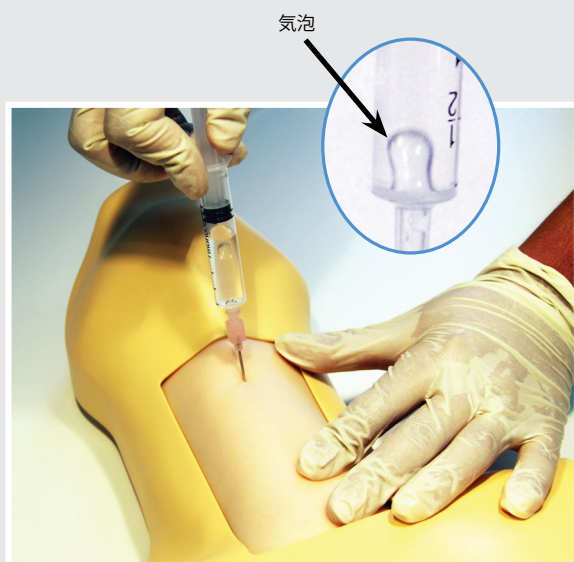

Step 3：カテーテルセットに同梱の穿刺針のいずれかを6cc シリンジに取り付け、正中線上、前頭面に対して尾側方向に45°の角度で経皮穿刺します。吸引後、気泡の発生により、位置が適切であることを確認します。




Step 4：気管に到達したらシリンジを抜去します。二針型穿刺針を使用している場合は内針も抜去します。次に、ガイドワイヤの柔軟な先端部分を一針型穿刺針または二針型穿刺針の外套に挿入します。

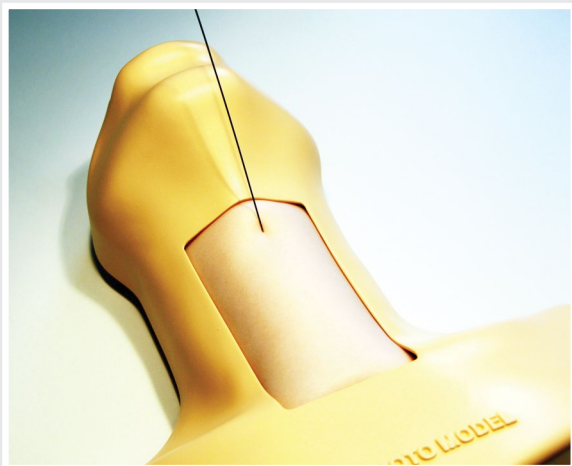

Step 5: ガイドワイヤを気管内に挿入後、外套または一針型穿刺針を抜去します。



Step 6: ダイレータと気道チューブ（輪状甲状膜切開用カテーテル）を一体にして、ガイドワイヤの硬い手元側がダイレータのハンドルから現れるまで、ガイドワイヤに沿って進めます。

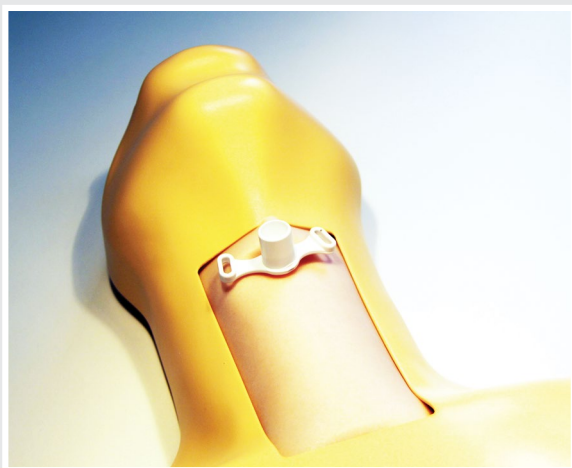

Step 7: ダイレータと気道チューブ（輪状甲状膜切開用カテーテル）を一体にして気管内に完全に挿入し、ダイレータとガイドワイヤを抜去します。



Step 8: 標準的なアダプタを用いて、緊急用気道カテーテルを適切な換気デバイスに接続します。



Melker

緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルセット

Melker緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルセットは、気管内チューブの挿入ができない場合などの緊急気道確保に使用します。Melkerによる輪状甲状膜からの気道確保には、経皮的（セルジンガー法）手技を用います。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 内径 mm	カテーテル 長さ cm	穿刺針 ゲージ G	穿刺針 長さ cm	ダイレータ Fr	ダイレータ 長さ cm	ガイド ワイヤ 径 inch	ガイド ワイヤ 長さ cm	ガイド ワイヤ 先端部
G06245	C-TCCS-350	3.5	3.8	18	4	10	7.1	.038	30	柔軟
G06246	C-TCCS-400	4	4.2			12	7.6			
G04652	C-TCCS-600	6	7.5		7	18	13.3		40	

販売名：気道アクセス用デバイス
承認番号：20300BZY00356000



6 cc シリンジ



(一針型) 穿刺針
ステンレススチール製




(二針型) 穿刺針
内針: ステンレススチール製
外套: 四フッ化エチレン樹脂




尖刀(スカルペル)




ガイドワイヤ
ステンレススチール製

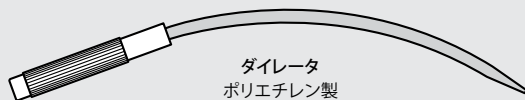


ダイレータ
ポリエチレン製

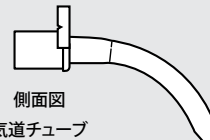

側面図
気道チューブ
(輪状甲状膜切開用カテーテル)
ポリ塩化ビニル製

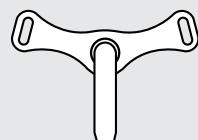

正面図
気道チューブ
(輪状甲状膜切開用カテーテル)
ポリ塩化ビニル製

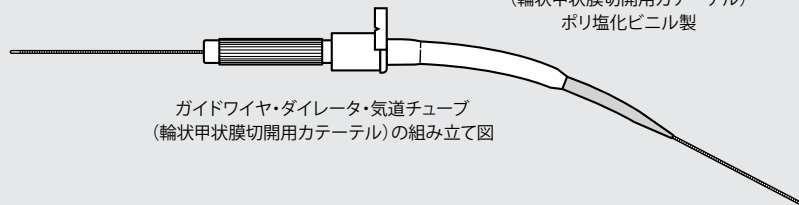

ガイドワイヤ・ダイレータ・気道チューブ
(輪状甲状膜切開用カテーテル)の組み立て図

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com



販売に関するお問合せ先

株式会社 MEDiK
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F
TEL: 03-6264-9961 FAX: 03-6264-9962
Email: medinfo@medik.co.jp
medical.medik.co.jp

