


An important component supporting
successful EVAR and TEVAR procedures.

12 Fr
シース
に対応する
ロープロファイル
タイプが登場

Coda[®] and Coda LP Balloon Catheters

Coda[®] および Coda LP バルーンカテーテルの主な特徴

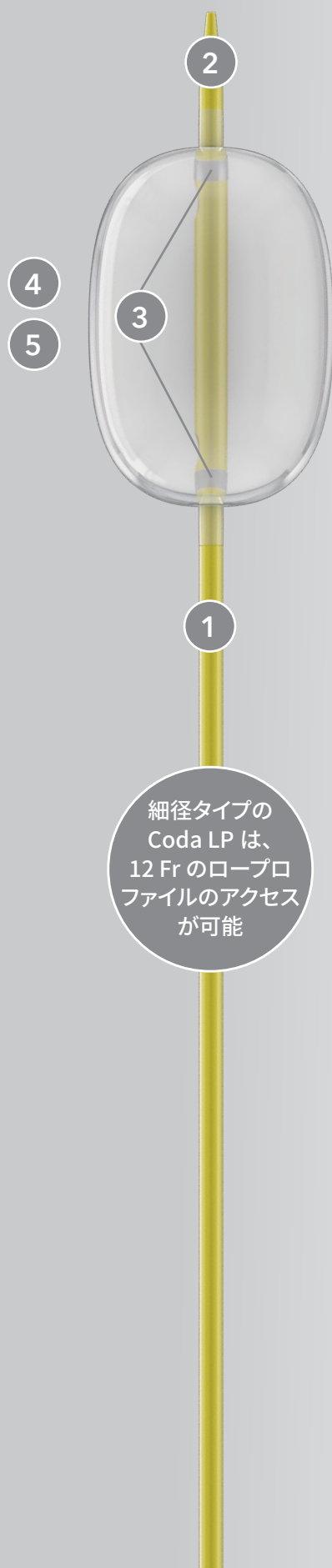

1. カテーテル

AAA と TAA 血管内治療に対応できるよう、100 cm と 120 cm のカテーテルシャフトを採用しています。

2. スムーズな挿入を実現する遠位端デザイン

血管損傷を軽減することを意図して、先端は長くテーパされた形状です。オーバーザワイヤーで優れたトラッカビリティが得られます。

3. エックス線不透過性マーカ

エックス線不透過性マーカが、バルーン近位側と遠位側の両方に配置されており、血管または人工血管内での正確な位置決めに役立ちます。

4. 拡張径

バルーンは直径 32 mm と 40 mm の 2 種類があり、直径 8 ～ 40 mm の血管に使用できます。*

5. 素材

Coda のバルーンはポリウレタン素材であり、ラテックスアレルギーの患者さまにも使用できます。

細径タイプの
Coda LP は、
12 Fr のロープロ
ファイルのアクセス
が可能

* 40 mm 径 Coda バルーンカテーテルは、直径 24 mm 未満の血管には使用しないでください。また、腸骨動脈や大動脈以外に留置されたステントグラフトの拡張に使用しないでください。

Coda および Coda LP バルーンカテーテルの 拡張パラメータ

Coda バルーンカテーテル

カタログ番号	最大拡張体積
CODA-2-10.0-35-120-40*	40 mL

Coda LP バルーンカテーテル

カタログ番号	最大拡張体積
CODA-2-9.0-35-100-32	30 mL
CODA-2-9.0-35-120-32	30 mL


拡張体積 (mL)	バルーン径 (mm)	
	Coda 40 mm	Coda LP 32 mm
5	17.8	10.5
10	24.1	14.7
15	27.6	21.3
20	31.2	25.5
25	34.1	29.1
30	36.4	32.2
35	38.3	—
40	40.0	—

Coda バルーンカテーテル

▲ = CODA-2-10.0-35-120-40

Coda LP バルーンカテーテル

● = CODA-2-9.0-35-100(120)-32

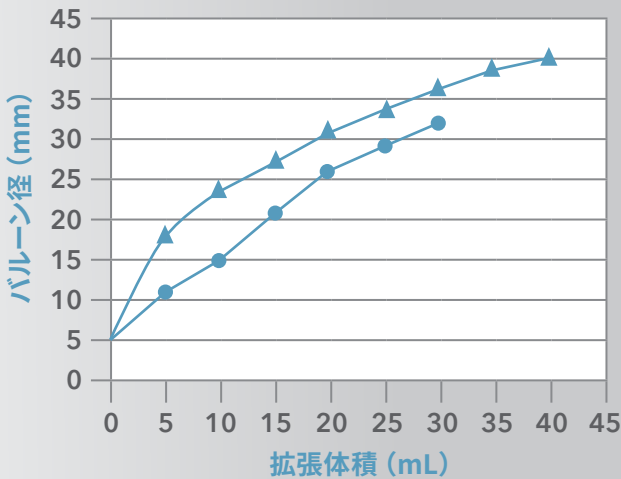

Coda および Coda LP は、大血管の一時的閉塞の治療や大血管に留置されるステントグラフトの後拡張に使用するバルーンカテーテルです。

Coda® BALLOON CATHETER

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル Fr	カテーテル 全長 cm	推奨 イントロデューサ Fr	適合 ガイドワイヤ 径 inch	バルーン 最大拡張 径 mm	バルーン 最大拡張 体積 mL
バルーンカテーテル							
G53025	CODA-2-10.0-35-120-40*	10.0	120	14	0.035	40	40

販売名：COOK CODA バルーンカテーテル
承認番号：22200BZX00071000

Coda LP® BALLOON CATHETER

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル Fr	カテーテル 全長 cm	推奨 イントロデューサ Fr	適合 ガイドワイヤ 径 inch	バルーン 最大拡張 径 mm	バルーン 最大拡張 体積 mL
バルーンカテーテル							
G03831	CODA-2-9.0-35-120-32	9	120	12	0.035	32	30
G03832	CODA-2-9.0-35-100-32	9	100	12	0.035	32	30

販売名：COOK CODA LP バルーンカテーテル
承認番号：22200BZX00071000

* 40 mm 径 Coda バルーンカテーテルは、直径 24 mm 未満の血管には使用しないでください。また、腸骨動脈や大動脈以外に留置されたステントグラフトの拡張に使用しないでください。

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

