




# Needle's Eye Snare<sup>®</sup>

TRANSVENOUS RETRIEVAL SET

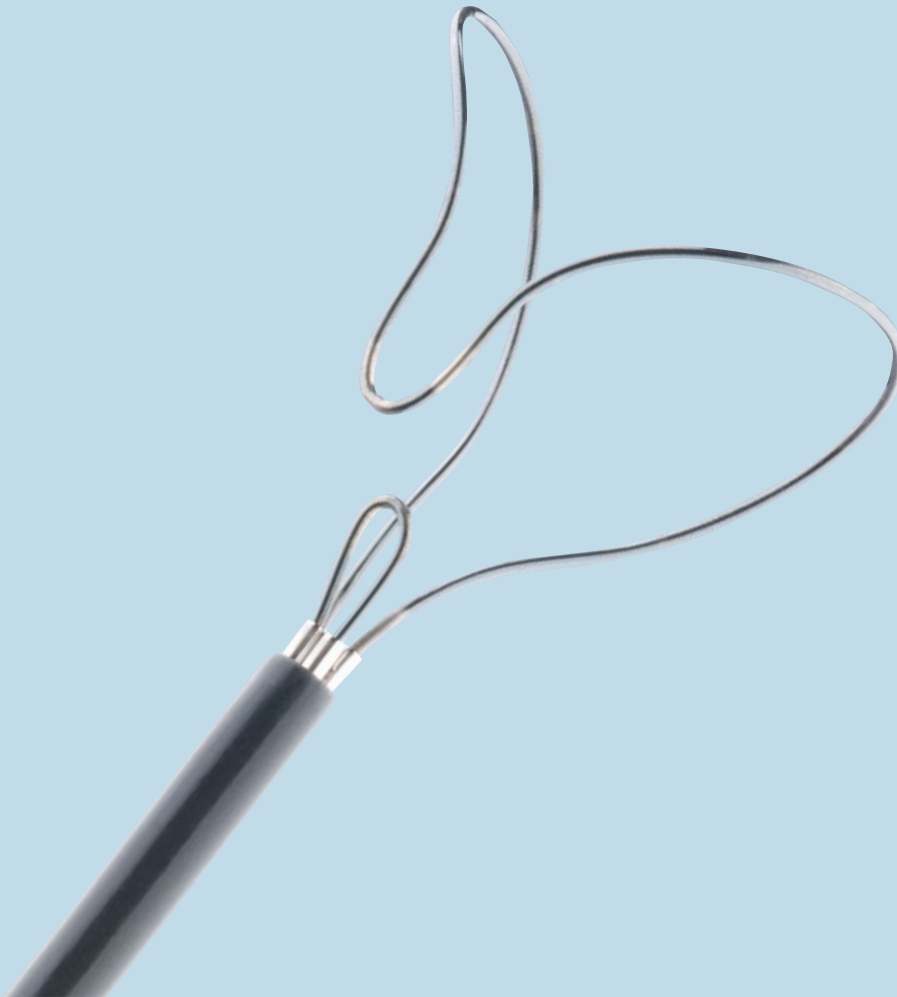


Capture problematic cardiac leads  
for percutaneous extraction.



# Needle's Eye Snare<sup>®</sup>

TRANSVENOUS RETRIEVAL SET

Needle's Eye Snare<sup>®</sup> は、ペースメーカーや除細動器のリード、カテーテル等の異物を経静脈的に除去するスネアカテーテルです。止血弁付 16 Fr イントロドューサシースを介してスネアカテーテルを対象物の近くまで到達させます。

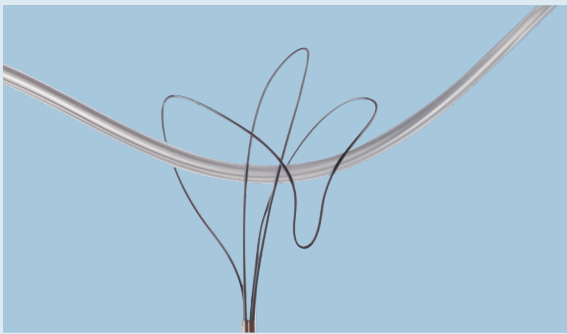

## 取り囲みによる捕捉

標的物の形状や遊離端の有無にかかわらず、2本の把持ループでペースメーカーや除細動器のリード、カテーテル、ガイドワイヤ、あるいはそれらの破断片等の異物を取り囲みます。



## 安定した把持


12Fr シースを制御しながら前進させスネアを閉じ、標的物を確実に把持します。シースは癒着組織から標的物を引き離すカウンタートラクションの操作をサポートします。



## クイックリリース

スレッタを引き戻すだけで把持を解除できます。

## 形状・構造

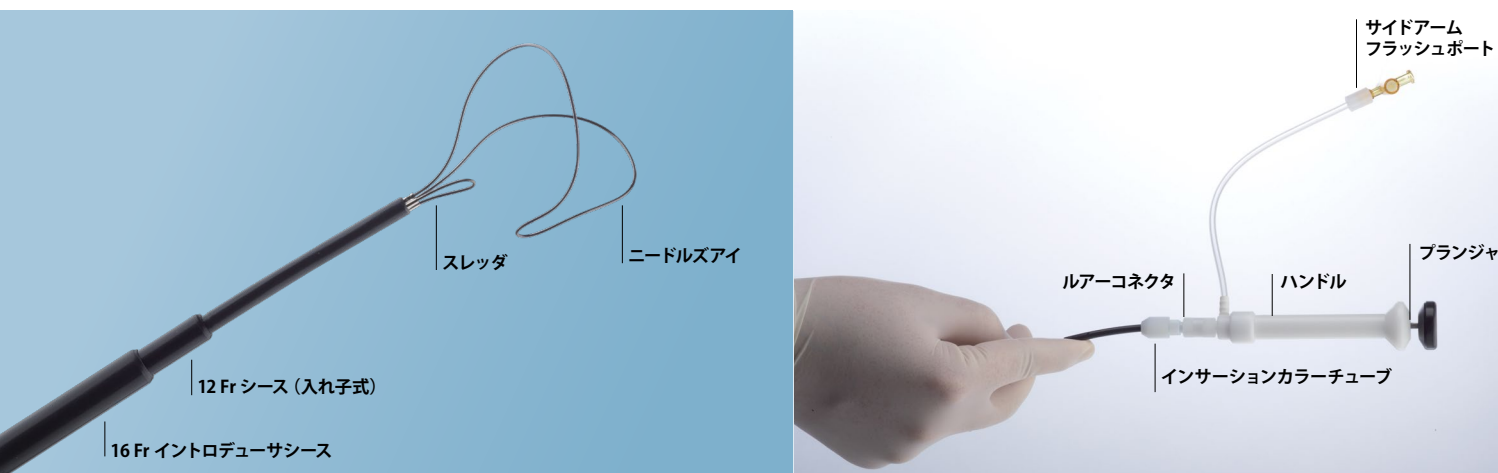

### ニードルズアイ

大きなナイチノール製ループが展開し標的物を捕捉します。  
スネア径は、13 mm 径と 20 mm 径からお選びいただけます。

### スレツダ

小さなナイチノール製ループがニードルズアイの大きなループ内を通り抜け、  
標的物を完全に取り囲みます。

### ハンドル

片手でもスレツダの操作が可能です。

### プランジャ

プランジャを押すとスレツダが前進し、引き戻すとスレツダが収納され取り囲みを解除できます。

### サイドアーム フラッシュポート

シースの最内側ルーメンを生理食塩水等でフラッシュする際に用います。

### 12 Fr シース (入れ子式)

シースを前進させスネアをシース内へ引き込むことで、標的物をしっかり把持できます。

### 16 Fr イントロデューサ シース

スネアで把持した標的物にイントロデューサシースを被せて収納し除去します。

### インサージョン カラーチューブ

ストレート型 12 Fr シースをカーブ型 12 Fr シースへ交換する場合は、  
インサージョンカラーチューブ内へスネアを収納することで容易に交換できます。


### ルアーコネクタ

ルアーコネクタを回すとハンドルとインサージョンカラーチューブの接続が解除できます。



# Needle's Eye Snare®

TRANSVENOUS RETRIEVAL SET

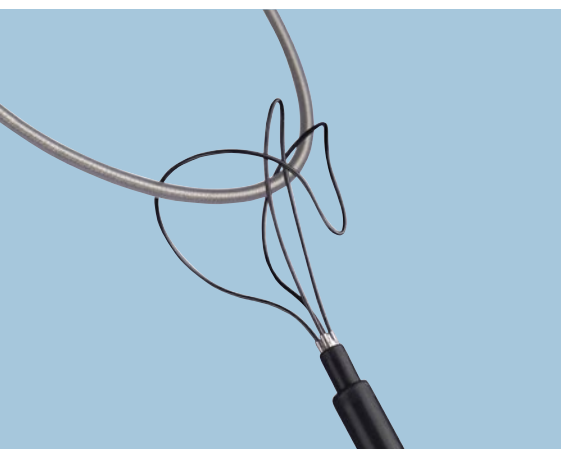

## その他の特長

- カーブ型 12 Fr シースへの交換が可能であり、静脈内での位置決めが向上します。
- フラッシュポートは、シース最内側のルーメンと繋がっています。
- カーブ型 16Fr イントロドューサシース (LR-CSS16) にも、セルジンガー法で用いる構成品が含まれます。
- エックス線透視下で視認できます。
- 本品は滅菌済みで、単回使用です。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	スネア径 mm	全長 cm
<b>スネアカテーテルおよびワークステーション</b>			
G26517	LR-NES001	13	94
G26515	LR-NES002	20	94
G26533	LR-NES541	13	54
グローバル 製品番号	カタログ 番号	シース 外径 Fr	シース 長 cm
<b>カーブ型 12Fr シース</b>			
G26505	LR-CRVFEM001	12.0	91.4
<b>カーブ型 16Fr イントロドューサシース (ワークステーション)</b>			
G26566	LR-CSS16	16.0	69.5

Needle's Eye Snare® は、経静脈的リード抜去に対する Cook Medical のアプローチのひとつです。

販売名: COOK ニードルズアイスネア  
承認番号: 22600BZX00538000

### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
cookmedical.co.jp

### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com  
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com  
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com  
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com  
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com  
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com  
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com  
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com  
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com  
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com  
SADC: +65 63207600, sadc\_cs@cookmedical.com  
cookmedical.com

