

Secure and extract  
small stone fragments.



NCompass™

ナイチノール結石エクストラクタ

# NCompass™

ナイチノール結石エクストラクタ

マルチワイヤ形状を特長とする N コンパスナイチノール結石エクストラクタは、結石を除去する効率性を改善するように設計されています。

独自のマルチワイヤ形状は、完全にリリースされると従来の 3 ワイヤまたは 4 ワイヤのバスケットとなり、部分的に閉じるとバスケットは隙間の少ない 12 ワイヤまたは 16 ワイヤのバスケットとなるように形状が変化します。


N コンパスエクストラクタの二重構造により、破碎されていない結石の通常の捕捉と除去が可能になるだけでなく、TUL 後に複数の小片を捕捉することも可能なデザインになっています。

N コンパスナイチノール結石エクストラクタは、TUL 後の尿管内の結石をくまなく除去する際に役立ちます。

## Features


マルチワイヤ形状	完全にリリースされたときの 3 ワイヤまたは 4 ワイヤデザインと部分的に閉じた 12 ワイヤまたは 16 ワイヤデザインの二重構造のバスケットデザイン。バスケットは完全にリリースされると、先端部位の網形状が結石の移動を防止します。
チップレスデザイン	チップレスバスケットデザインは N サークル <sup>1)</sup> バスケットの特性を受け継ぎ周囲の組織への外傷を低減させます。
ナイチノール	形状記憶特性により、リリースされたときの形状を維持します。耐キンク性によって、複数回の開閉に耐えられる耐久性のあるバスケットを形成します。柔軟なため結石の捕捉とリリースを可能にします。
フレキシブルシース	結石の捕捉操作中に軟性尿管鏡の屈曲を妨げません。
1.7 Fr シース	細径のため内視鏡の灌流量が向上します。

1) 販売名: COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル  
認証番号: 219AABZX00263000

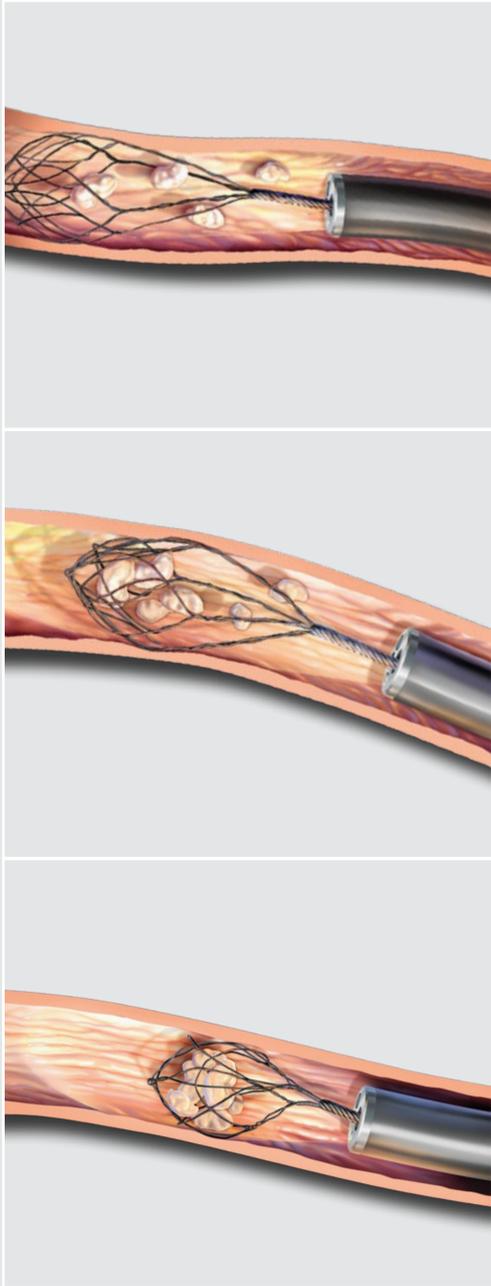

## Procedure

- 1 Nコンパス結石エクストラクタは、完全にリリースされるとバスケットの手元側部分に開口部ができ、結石が入りやすくなる特長があります。
- 2 バスケットが尿管内で引き戻されると、バスケット先端部のマルチワイヤが結石を捕捉し、結石の移動を防止します。
- 3 Nコンパス結石エクストラクタを徐々に閉じると、捕捉された結石がマルチワイヤ形状に包み込まれ、結石の捕捉と除去がより確実に操作できます。

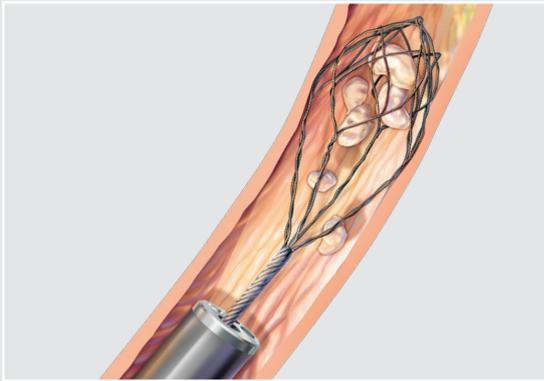

## NCompass™

ナイチノール結石エクストラクタ

N コンパスナイチノール結石エクストラクタは、尿路内で結石の捕捉および除去に使用します。本製品は、滅菌済の状態でピールオープン式に包装されており、単回使用製品です。

グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	シース長 cm	バスケット 直径 cm	バスケット形状	チップ形状
<b>N コンパスナイチノール結石エクストラクタ</b>						
G46027	NCT4-017115	1.7	115	1.0	4ワイヤ、16ワイヤ	チップレス
G32701	NCT4-024115	2.4	115	1.0	4ワイヤ、16ワイヤ	チップレス
G32863	NCT4-024115-MB	2.4	115	1.5	4ワイヤ、16ワイヤ	モディファイド バスケット
G32702	NC3-024115	2.4	115	1.5	3ワイヤ、12ワイヤ	オクルーシブチップ

販売名: COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル  
認証番号: 219AABZX00263000

#### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
cookmedical.co.jp

#### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com  
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com  
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com  
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com  
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com  
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com  
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com  
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com  
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com  
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com  
SADC: +65 63207600, sadc\_cs@cookmedical.com  
cookmedical.com

