


EchoTip® Ultra

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

吸引用シリンジの準備

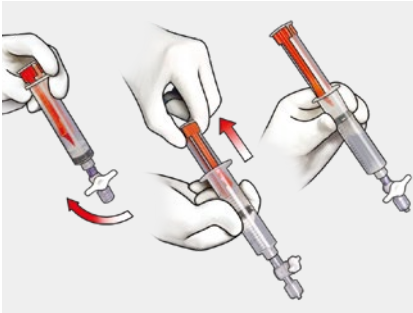


オプション - 吸引用シリンジを使用する場合

吸引用シリンジの活栓を「開」の状態にしてプランジャロックを押さえ、プランジャを吸引用シリンジ内に完全に押し込める。活栓を「閉」の位置に回して、希望する状態までプランジャを引き戻し、陰圧をかけます。


(プランジャロック：2段階固定)

チャンネルアダプタ設置

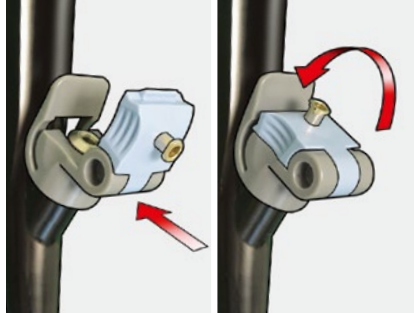

アダプタ頭部を上げ開いた状態で内視鏡の鉗子口にスライドさせて取り付け、アダプタの基部を鉗子チャンネルの金属ハブの下に確実に滑り込ませます。アダプタ頭部を下げて、固定されていることを確認します。

Step 1

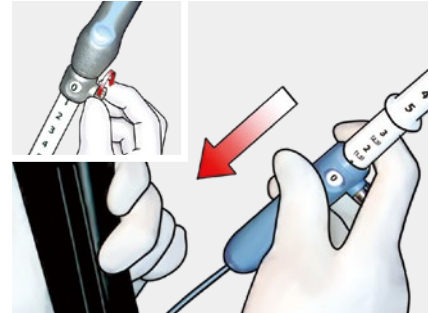


標的部位を確認します。内視鏡に挿入する前に、ニードル先端がシース内に完全に収納されていることを確認します。安全リングが「0」の位置でつまみが固定されていることを確認します。内視鏡に挿入し、接続部に達するまで進めます。ハンドルを時計回りに回して、デバイスを接続します。

Step 2



経超音波内視鏡的に鉗子チャンネルからシースが出ていることを視認し、シースを希望する長さに調整します。シースアジャスタのつまみを緩め、希望するシースの長さの目盛を表示窓に合わせて、つまみを締めます。

Step 3

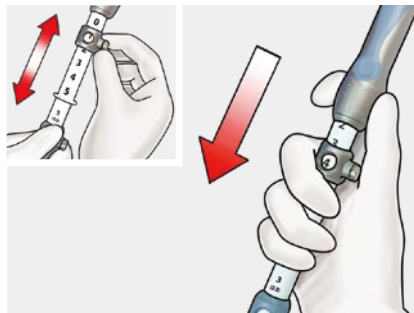


ニードル先端の突出部分を希望の長さに設定するため、安全リングのつまみを緩め、希望するニードルの長さの目盛を表示窓に合わせて、つまみを締めます。安全リングで設定した長さまでハンドルを押し進めて、シース内に収納されたニードルの先端を出し、標的部位に向けて穿刺します。

Step 4




生検には標準的なシリンジ吸引法が使用できますが、その他スタイレットを用いる方法や何も用いない方法が利用できます。スタイレットハブを慎重に引いて、スタイレットを抜去します。必要に応じて、検体採取を繰り返す場合に備えて、スタイレットを適切に保管します。シリンジを使用する場合は、Step 5に進みます。

Step 5

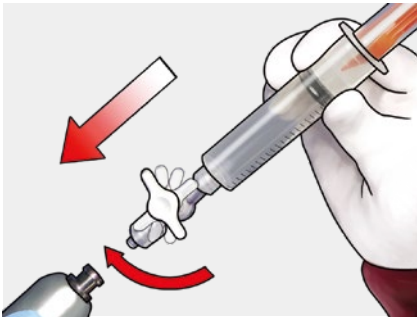


準備していた吸引用シリンジのおす・ルアーロックをハンドルの近位端ルアーロックに接続し、活栓を開いて、ニードル内を減圧することで生検を行います。標的部位内でニードルのハンドルを慎重に小さく前後に動かします。生検が終了後、活栓を「閉」の位置に回します。

Step 6

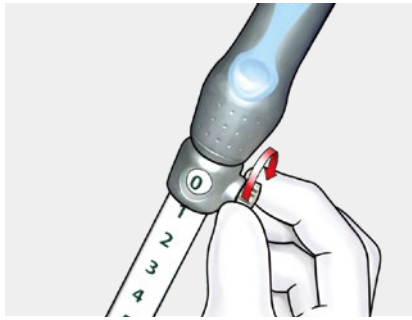


ニードルをシース内に完全に収納し、安全リングのつまみを「0」の位置で固定します。

Step 7

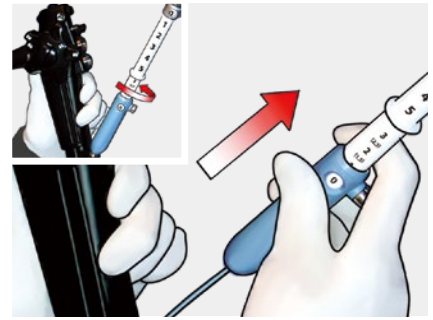

ハンドルの遠位端ルアーロックを反時計回りに回して、超音波内視鏡の鉗子口に接続されたチャンネルアダプタから外し、デバイス全体を内視鏡から外します。


Step 8

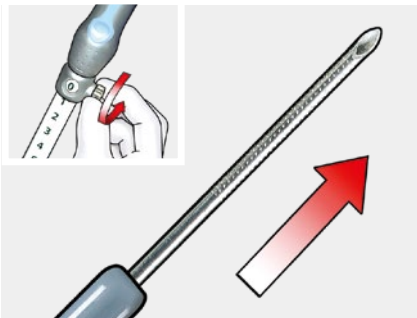

安全リングのつまみを緩めて、針先を出します。空の汎用シリンジ（本構成品外）かスタイレットを用いて、採取した組織標本を押し出します。各医療機関のガイドラインに従って検査用サンプルを準備してください。

追加の組織を採取する場合は、スタイレットを生理食塩水または滅菌水で拭き、Step 1～8を繰り返します。

Step 9

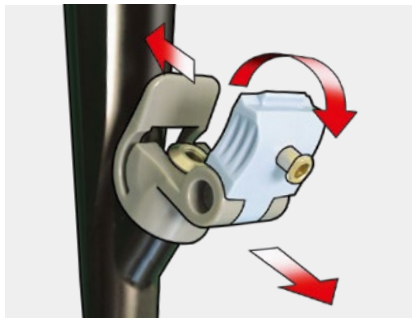

処置の終了後は、アダプタの固定クリップを後ろに引いて頭部を持ち上げ、アダプタをスライドさせて内視鏡から外します。

本品の詳しい使用方法是最新の添付文書を参照してください。

本品はオリンパス社製の超音波気管支内視鏡と併用してください。

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com



販売に関するお問合せ先

株式会社 MEDIK
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F
TEL: 03-6264-9961 FAX: 03-6264-9962
Email: medinfo@medik.co.jp
medical.medik.co.jp

