


经颈静脉肝内穿刺套装

图解使用指南

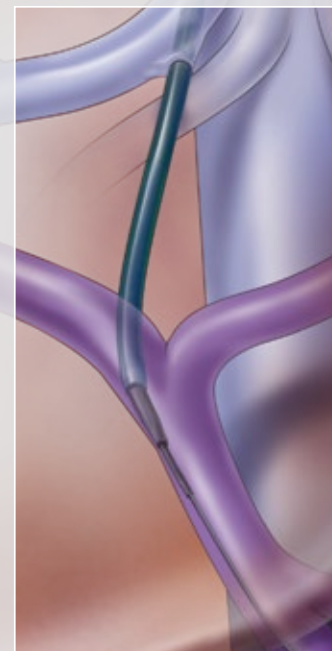

插图作者

Forrest

Ring

经颈静脉肝内穿刺套装



采用专为经颈静脉肝内穿刺设计的产品。

特点和优点

- Colapinto 加硬套管可以帮助肝内血管穿刺，以便随后放置导丝、导管和导引器。
- Flexor® 导引器可提供灵活性，抗弯折或压缩。
- 不透射线标记带增加了定位的可视性。




订货号码 产品型号		加硬套管 gage	加硬套管 长度 cm	Flexor Check-Flo Performer 导引器 Fr	Flexor Check-Flo Performer 导引器 长度 cm
G06541	RTPS-100	16	50.5	9	38.5


经颈静脉肝内穿刺

图解使用指南

请参阅使用说明书 (IFU) 以了解完整的使用和处方信息。

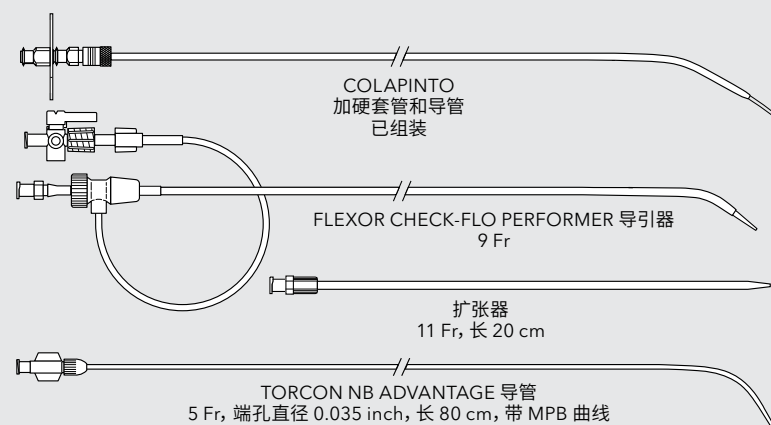


1

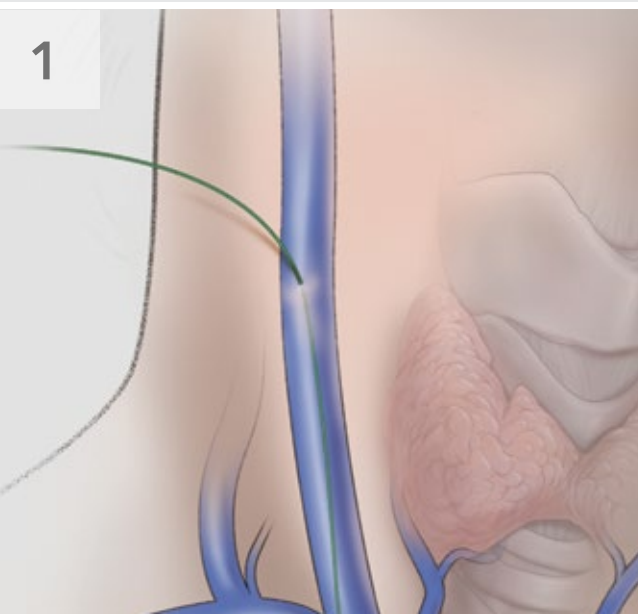

使用微穿刺技术或 18 gage 标准穿刺技术, 通过颈静脉穿刺将适当的直径为 0.035 inch 的导丝导入下腔静脉。


8

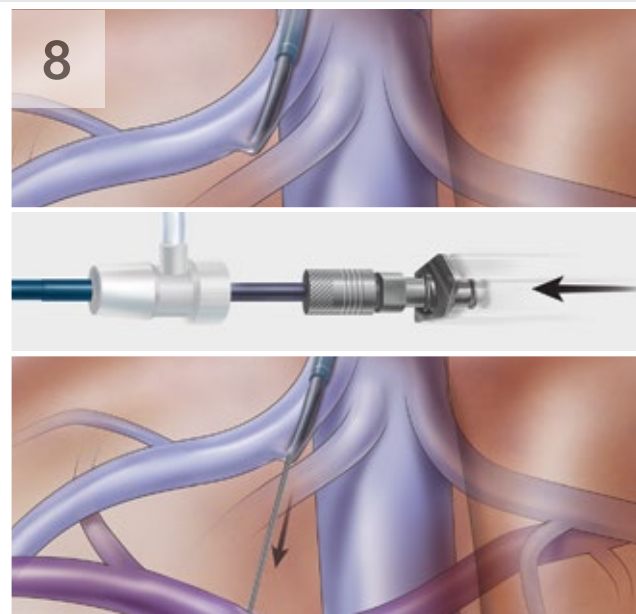

靠着静脉壁置入 Colapinto 加硬套管和 PTFE 导管组件。


向前推进加硬套管, 通过肝实质, 朝向门静脉系统。

2

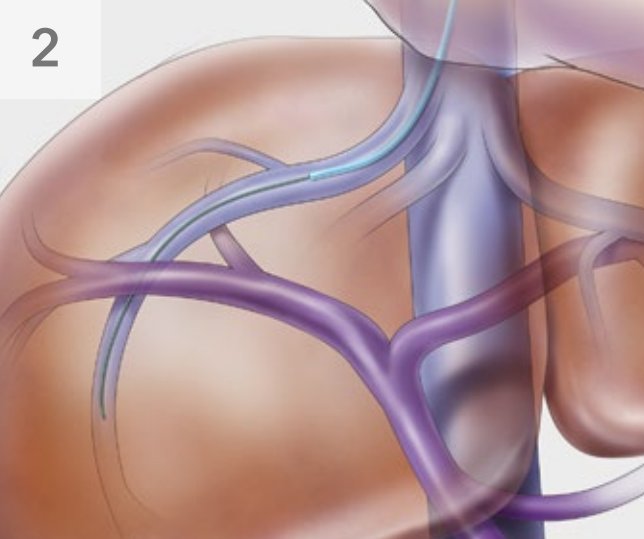


使用您选择的 Torcon NB Advantage 导管和导丝，将导管插入肝右静脉 (RHV) 或最恰当的肝静脉分支。

3

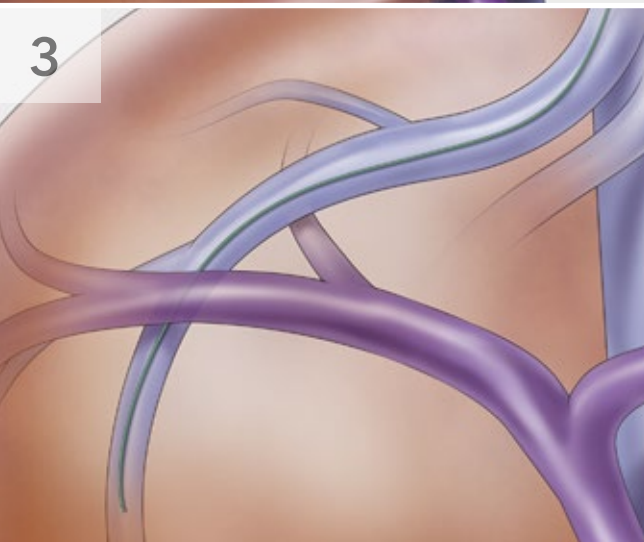

将导丝至于安全的远端位置，并取下 Torcon NB Advantage 导管。

4

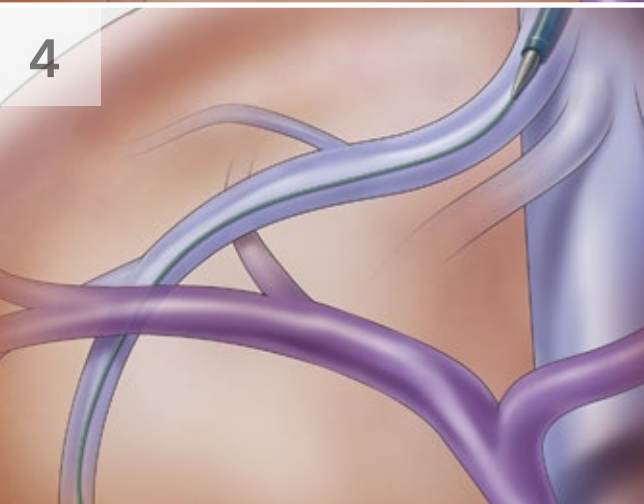

使用 11 Fr 扩张器扩张穿刺位点。通过导丝将 Flexor 导引器组件尽可能远地推入肝静脉。取下导丝和 Flexor Check-Flo Performer 导引器的扩张器。


9



装满造影剂的注射器连接加硬套管后，在回撤加硬套管同时回吸注射器，直至见回血停止。




注射少量造影剂。

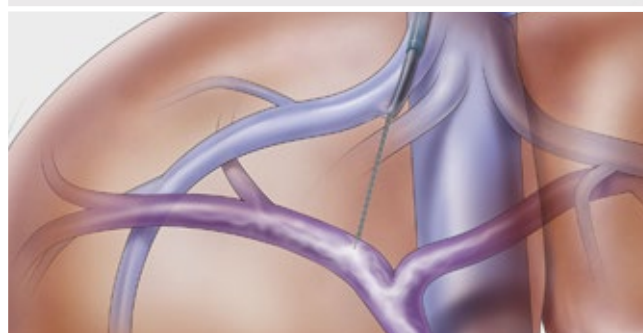


确定加硬套管在门静脉系统中的位置。

10

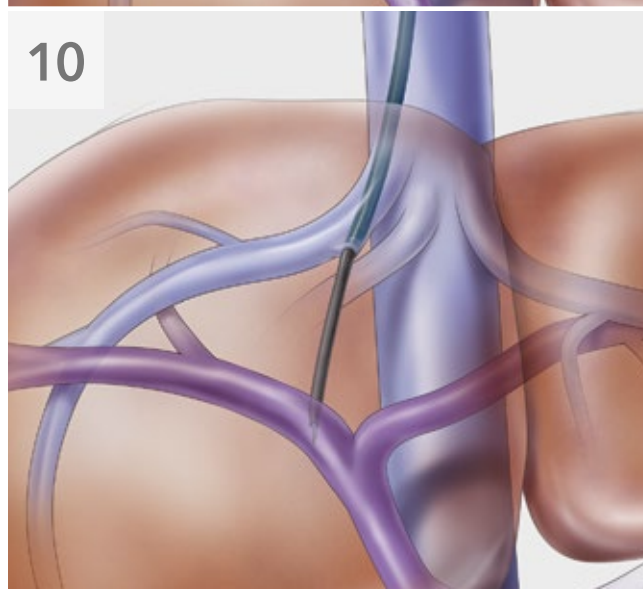


通过加硬套管将 PTFE 导管进一步推入门静脉分支。取出加硬套管。

5

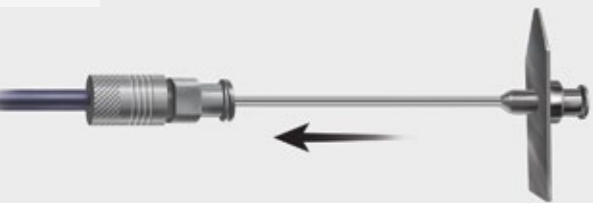

通过导引器导入 Colapinto 加硬套管和 PTFE 导管组件。加硬套管不得前伸超过导管端孔。

6

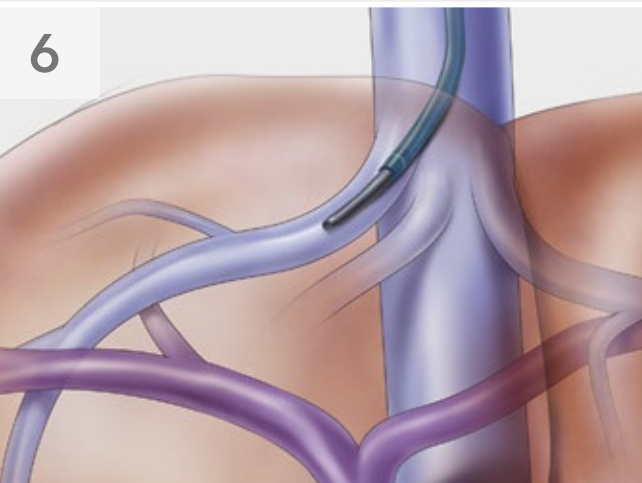

将 Colapinto 加硬套管和 PTFE 导管组件推入肝静脉。


7



向下适当调整 Colapinto 加硬套管和 PTFE 导管组件，然后朝前旋转推进。


（加硬套管上的箭头方向表示加硬套管远端弯曲的方向。）

11

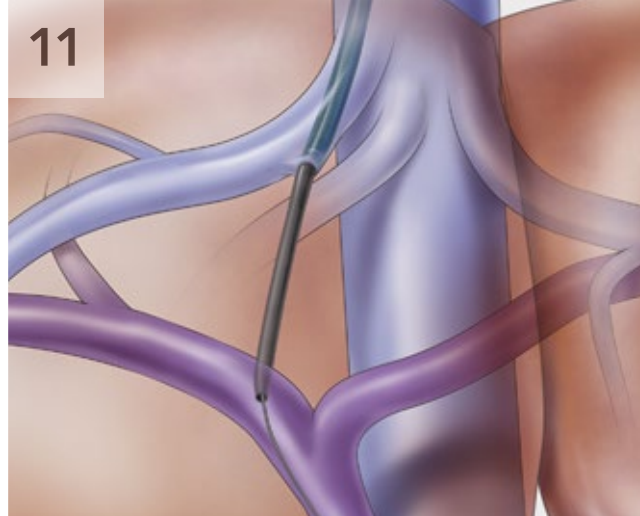


将 Newton 导丝导入门静脉分支，并进一步进入门静脉主干（MPV）。

12

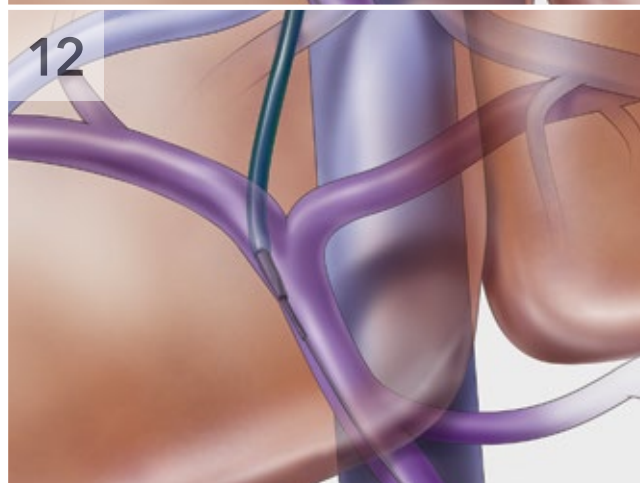

将 PTFE 导管和 Flexor 导引器经肝实质通路一并推入门静脉分支。将 Van Andel 导管通过 PTFE 导管进一步推入门静脉主干。

13

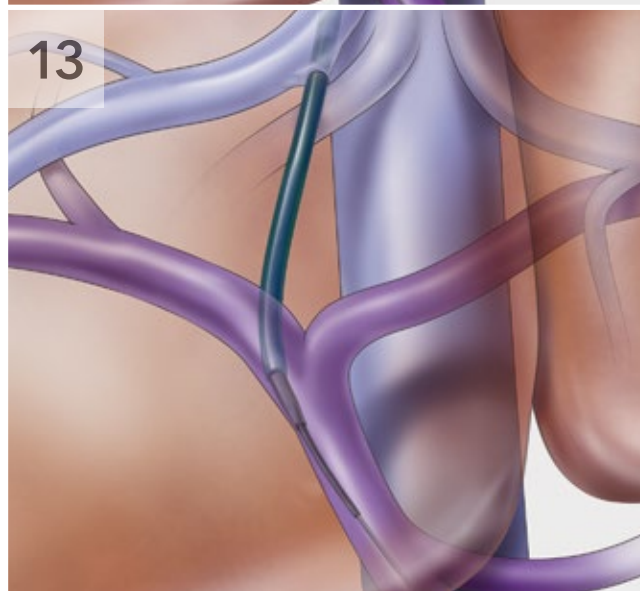

进行进一步的介入治疗。

产品名称: 经颈静脉肝内穿刺器械
生产企业名称: Cook Incorporated (库克公司)
注册证号: 国械注进20173150688
广告批准文号: 沪医械广审(文)第2019010359号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
邮箱: ChinaCSSupport@cookmedical.com