

缺陷心脏电极捕捉  
并经皮取出。



## Needle's Eye Snare

经静脉回收套装

Needle's Eye Snare 是一种经由静脉抓取装置，可在目标心脏电极或静脉导管体周围形成篮状圈套器。它通过一根同轴放置在16 Fr (OD 外径) 血管鞘中的柔软细长的 12 Fr 内鞘，传送到电极或导管附近，在其近端有个止血阀。



### 环绕式抓取

两种形状固定的环可以圈住心脏电极、留置导管、导管碎片或导丝以及其他异物，无论是直的，有形状的，有游离端和无游离端均可。



### 确保锁住


小心推动内鞘管把圈套器收紧，以便确保牢牢锁住目标异物。内鞘管和外鞘管可以用于破坏纤维粘连组织，必要时还可以用鞘管进行反作用力取出心肌内电极的头端。



### 快速释放

只需缩回收装置即可释放抓取物。

器械详情

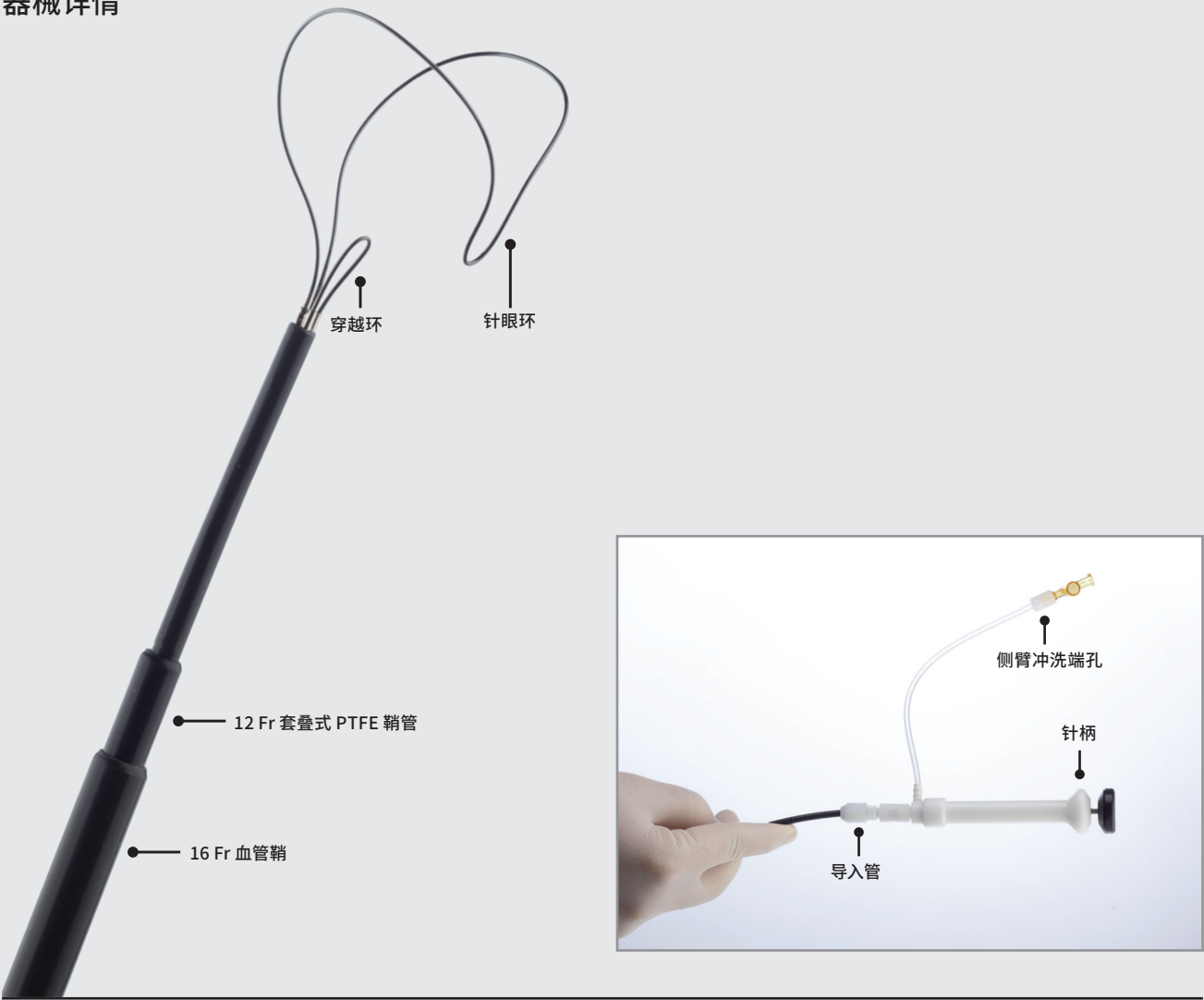

**针眼环** 这个大环由镍钛合金制成，可以在手术实施过程中保持其形状并钩住目标物体。环剖面直径有13和20mm两种可选。

**穿越环** 这个小镍钛环可穿过第一个环,以完全缚住目标物体。

**手柄** 手柄的设计能够让医生单手完成对穿越环的操作。

**针柄** 按下针柄推动穿越环，回拉针柄移动圈套过程。

**侧臂冲洗端孔** 侧臂冲洗端孔可用于液体冲洗或生理盐水预充圈套器内腔。

**12 Fr 套叠式PTFE 鞘管** 推动此鞘可收紧圈套器以牢固地抓住目标物体。

**16 Fr 血管鞘** 推进此鞘包裹圈套器和被抓牢物体，为取出做准备。

**导入管** 导入管向前推动可收紧圈套器。

**鲁尔接头** 旋转接头可以使导入管从紧邻手柄的固定位置上脱离开。



### 更多特性:

- 冲洗端孔连通圈套器的内腔
- 大直径的曲式股静脉导入鞘 (LR-CSS16) 配备有 Seldinger 插入组件
- 应用荧光镜检查时可见度高
- 器械采用无菌包装, 设计为一次性使用

| 订货号码         | 产品型号      | 环剖面直径<br>mm | 长度<br>cm |
|--------------|-----------|-------------|----------|
| <b>针眼圈套器</b> |           |             |          |
| G26517       | LR-NES001 | 13          | 94       |
| G26515       | LR-NES002 | 20          | 94       |
| G26533       | LR-NES541 | 13          | 54       |

| 订货号码                      | 产品型号     | 鞘外径<br>Fr | 鞘长度<br>cm |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>针对 94 cm 版本单独提供的组件</b> |          |           |           |
| <b>血管鞘</b>                |          |           |           |
| G26566                    | LR-CSS16 | 16.0      | 68.6      |

针眼圈套器是库克医疗经皮心脏电极综合取出方法的一个组件。

产品名称: 针眼圈套器套装

生产企业名称: Cook Vandergrift Inc. (库克范德格里夫特公司)

注册证号: 国械注进20163772399

产品名称: 经股静脉血管内回收器械

生产企业名称: Cook Vandergrift Inc. (库克范德格里夫特公司)

注册证号: 国械注进20163771294

广告批准文号: 沪械广审(文)第2019062362号

禁忌内容或注意事项详见说明书



**库克(中国)医疗贸易有限公司**  
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室  
邮编: 200030  
电话: +86-21-5451-9599  
电邮: chinacssupport@cookmedical.com