


自信地推进 取出鞘管。

Liberator™ 1
锁定探针

Bulldog™ 2
电极延长线

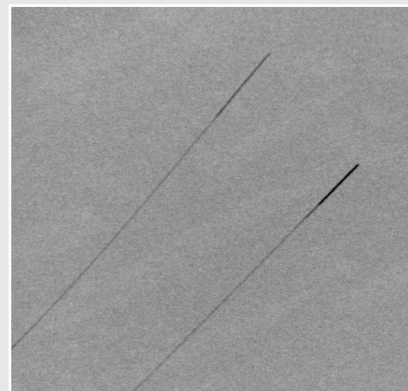

在荧光镜下清晰可见

心脏电极取出器械产品



1. 产品名称：锁定探针 BEACON Tip Locking Stylet
2. 产品名称：电极延长线 Lead Extender

Liberator™ 1

锁定探针

锁定探针带有不透射线功能，经皮取出中空的心脏电极、留置导管和异物。

- 剪断导管/电极导线近端的接头，检查线圈部分内腔的通畅度，在透视监控下将锁定探针送至导管/电极导线远端。
- 锁销装置可确保套管推送器在锁定探针推进通过线圈孔的过程中得到定位。
- 与锁定探针一体的延长线方便传送鞘管，无需连接导丝。

Liberator™ 的特点包括：

- 在荧光镜下清晰可见
- 能抓取孔径为 0.016 到 0.032 inch，即 0.41-0.81 mm 的电极
- 螺纹手柄
- 易于使用

1. 产品名称：锁定探针 BEACON Tip Locking Stylet





使用锁定探针

锁定探针应送至导管、电极导线的远端，并在透视监控下确认。

锁定探针为扩张鞘或其他取出器械提供支撑，沿锁定探针送入扩张鞘或其他取电极器械，至导管、电极导线的远端，将导管、导线与嵌顿组织分离。

若无锁定探针，拉拽造成的导管、电极导线损坏，可能会妨碍随后通过其内腔送入锁定探针和/或使对瘢痕组织的扩张操作变的更加困难。

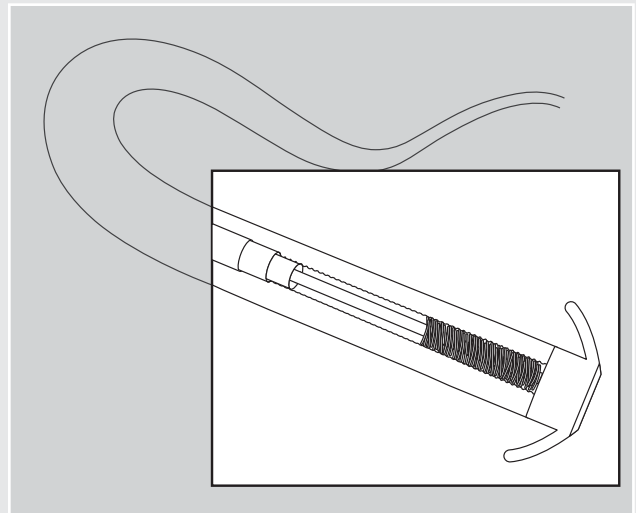
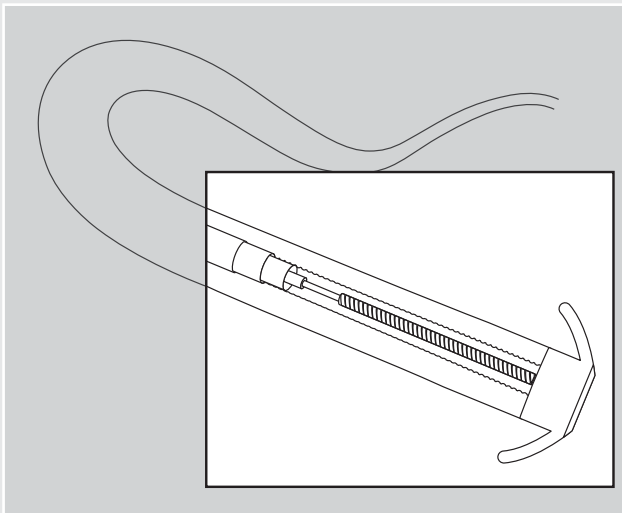


锁定探针具有管状柄把手，用力向前推，激活锁定装置，可将探针在电极远端锁定。

Bulldog™

电极延长线

电极延长线用于辅助经皮取出（非中空的）心脏
电极、留置导管、导管或导丝碎片和其他异物。

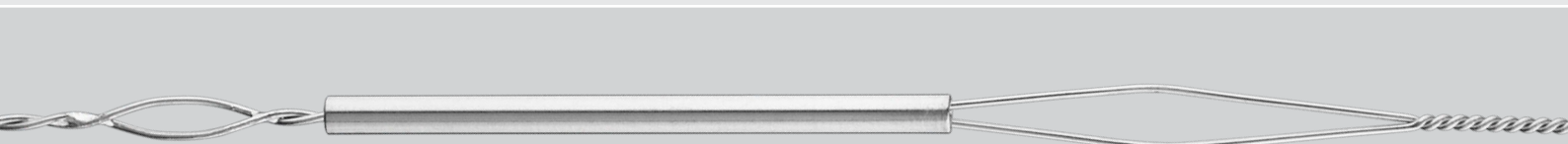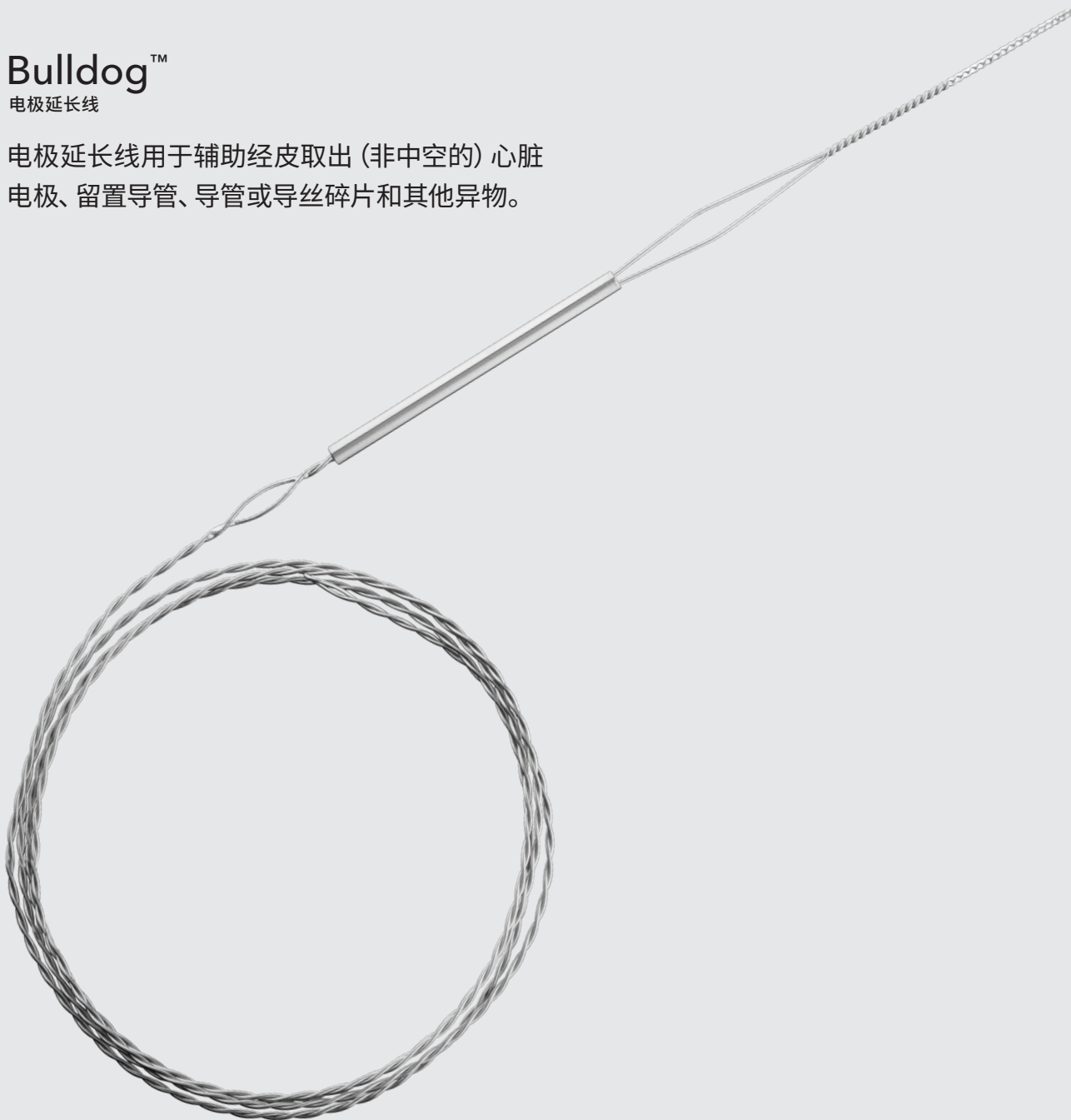

小孔径可以提供锚定部位将电极的外圈拴到 Bulldog 电极延长线上。

推进金属鞘管可以把大孔径环收进鞘管，折叠并包裹电极，以实现稳固地抓握，有利于取出操作。

大孔径可以插入和捕获暴露的电极或导电线。

心脏电极取出器械

Liberator™ 1

BEACON 锁定探针

帮助取出中空的心脏电极、留置导管和异物。一旦剪断近端的电极起搏器接头即可将这种专用探针插入心脏电极的导线孔, 然后将探针上锁到位, 牢固地抓住电极的远端。Liberator™ 锁定探针可以抓取孔径为 0.016 到 0.032 inch, 即 0.41-0.81 mm 的电极。

Bulldog™ 2

电极延长线

电极延长线用于辅助经皮取出 (非中空的) 心脏电极、留置导管、导管或导丝碎片和其他异物。电极延长线将电极延长以便拉入鞘管中。电极延长线环形孔滑到电极或导电线的一端后, 推动金属鞘管到环上, 稳固地抓住电极, 以方便取出操作。

订货号码	产品型号	总长度 cm	工作长度 cm
锁定探针			
G26550	LR-OFA01		72
电极延长线			
G46542	LR-LED01	70	

锁定探针和电极延长线都是库克医疗经皮心脏电极综合取出方法的组件。

产品名称: 锁定探针
生产企业名称: Cook Vandergrift Inc. (库克范德格里夫特公司)
注册证号: 国械注进20163033324
产品名称: 电极延长线
生产企业名称: Cook Vandergrift Inc. (库克范德格里夫特公司)
注册证号: 国械注进 20162025115

广告批准文号: 沪械广审(文)第260325-35038号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn