


双向旋转控制，
让电极移除手术更加顺畅。

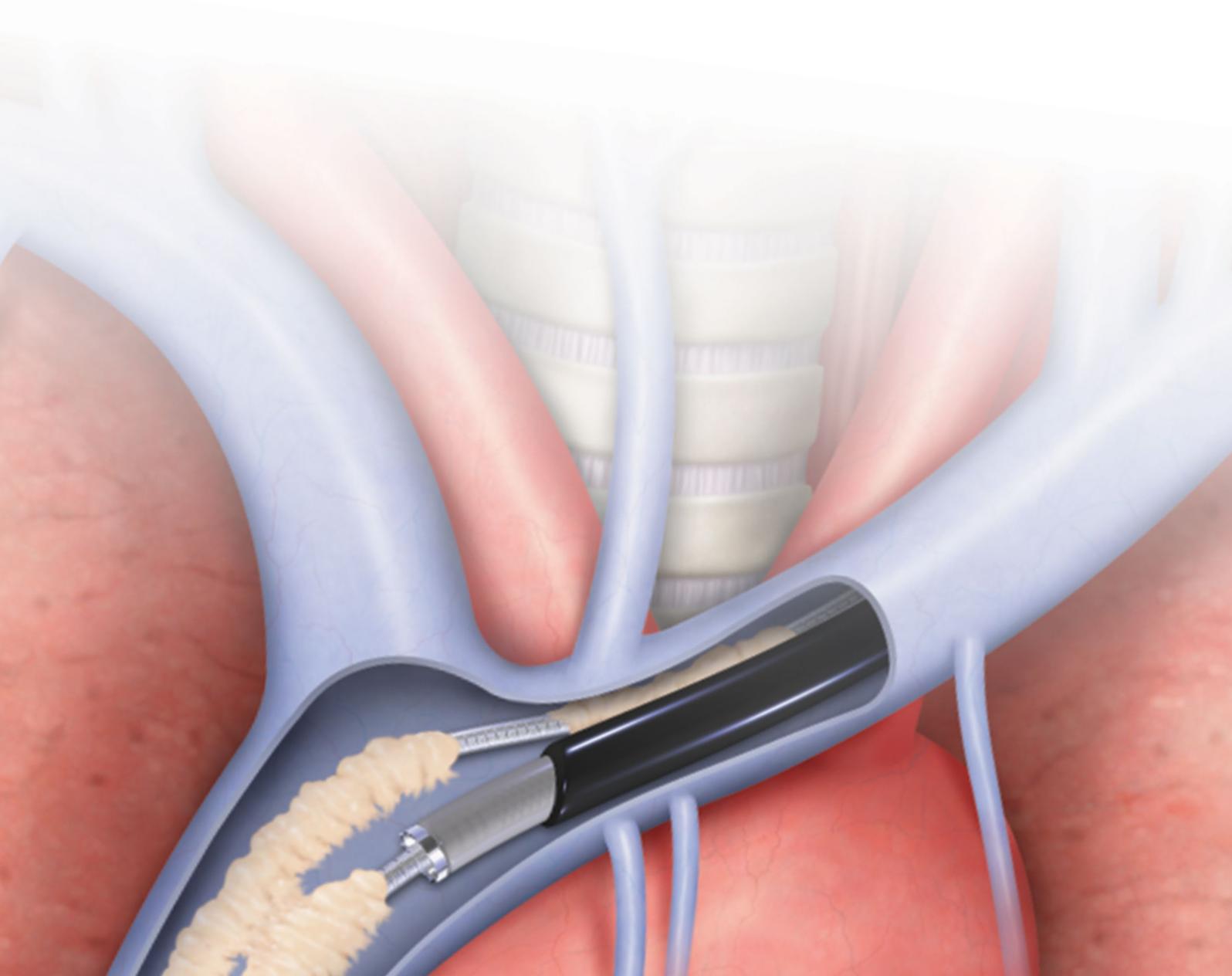

EVOLUTION® RL™

机械扩张鞘

EVOLUTION® RL™ 和 EVOLUTION® Shortie RL™ 机械扩张鞘，具有双向旋转鞘、不锈钢旋切头、独特的手柄和扳机，可以让您移除有问题的电极导线。

双向旋转鞘


- 以交替方向旋转或向一个方向连续旋转。
- 套迭式运动方式，交替推进内、外鞘。
- 不锈钢丝网编织的内鞘管。

不锈钢旋切头

- 用于旋切组织
- 四条螺纹状切割丝
- 双向旋转都可向前切割

手柄与扳机

- 单旋转运动：扳动扳机启动鞘旋转，不将扳机向前扳回至最大位置，可重复该动作。
- 双旋转运动：扳动扳机启动鞘旋转，将扳机向前扳回至最大位置，可机械地将鞘旋转方向变为上次旋转的相反方向。

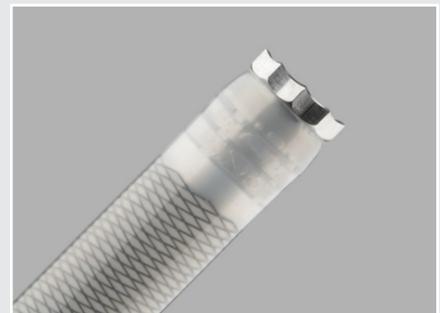

EVOLUTION® RL™

机械扩张鞘

EVOLUTION® RL™ 适用于经皮旋切心脏电极周围的组织，回收心脏电极、导管或异物。可提供多种尺寸。



EVOLUTION® Shortie RL™

机械扩张鞘



EVOLUTION® RL™

机械扩张鞘

订货号码	产品型号	内鞘管 内径 Fr
EVOLUTION® RL™ 机械扩张鞘		
G23737	LR-EVN-9.0-RL	9.0
G23746	LR-EVN-11.0-RL	11.0
G23747	LR-EVN-13.0-RL	13.0
EVOLUTION® RL™ 机械扩张鞘可与下列产品相容： STEADYSHEATH™ EVOLUTION® 固定鞘		适配鞘管 Fr
G25082	LR-TSS-9.0	9.0
G25083	LR-TSS-11.0	11.0
G25084	LR-TSS-13.0	13.0
EVOLUTION® Shortie RL™ 机械扩张鞘		
G23748	LR-EVN-SH-9.0-RL	9.0
G23749	LR-EVN-SH-11.0-RL	11.0
EVOLUTION® Shortie RL 机械扩张鞘可与下列产品相容： STEADYSHEATH™ EVOLUTION® Shortie 固定鞘		适配鞘管 Fr
G31908	LR-TSS-SH-9.0	9.0
G31923	LR-TSS-SH-11.0	11.0

产品名称: 机械扩张鞘

生产企业名称: Cook Vandergrift Inc. 库克范德格里夫特公司

注册证号: 国械注进 20163031897

广告批准文号: 沪械广审(文)第250906-14667号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com