

足月引产前促宫颈
成熟的机械性方法。





子宫颈扩张球囊



带可调式针芯

库克子宫颈扩张球囊是一种硅胶双球囊导管，带有一根可调式的针芯。子宫颈扩张球囊适用于足月引产前宫颈不宜进行引产时进行宫颈管机械扩张。

子宫颈扩张技术

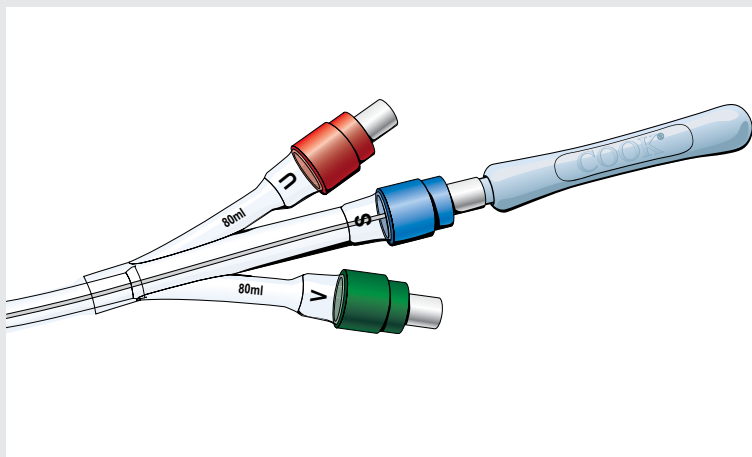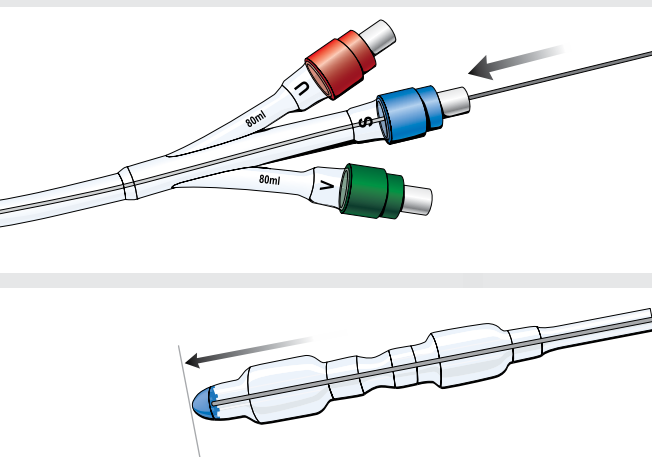

- 1** 手柄牢固地插入标有“S”的蓝色端口。

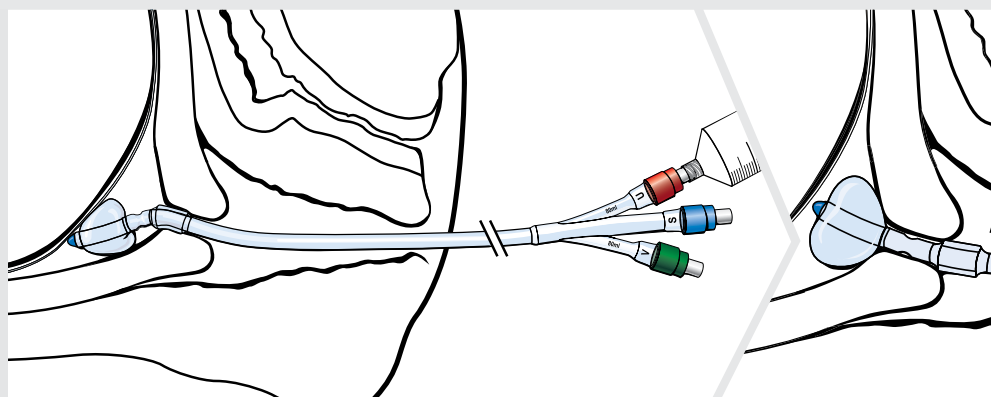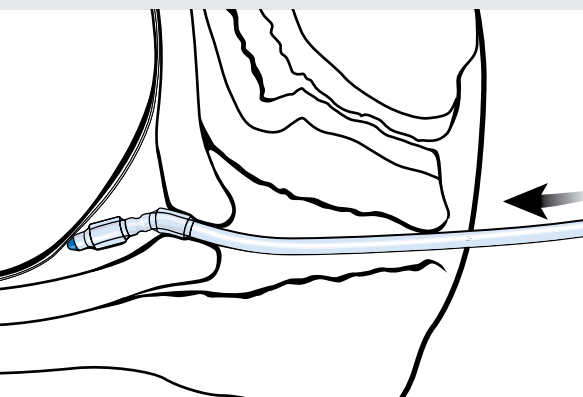


- 3** 推送宫颈扩张球囊，直至两个球囊均进入宫颈管。

- 4** 以 40 ml 无菌生理盐水充盈子宫球囊。
子宫球囊充盈后，回拉器械，直至子宫球囊抵住宫颈内开口。


请参阅产品使用说明书，以了解产品使用的完整信息及注意事项、警告和禁忌症的完整列表。

子宫颈扩张球囊 - 带可调式针芯


- 一种机械性扩张法。
- 移除器械时即可停止其作用。
- 无需牵引。
- 扩张过程中向宫颈内外口稳定施压。
- 带有一个完全包含于导管内的针芯。

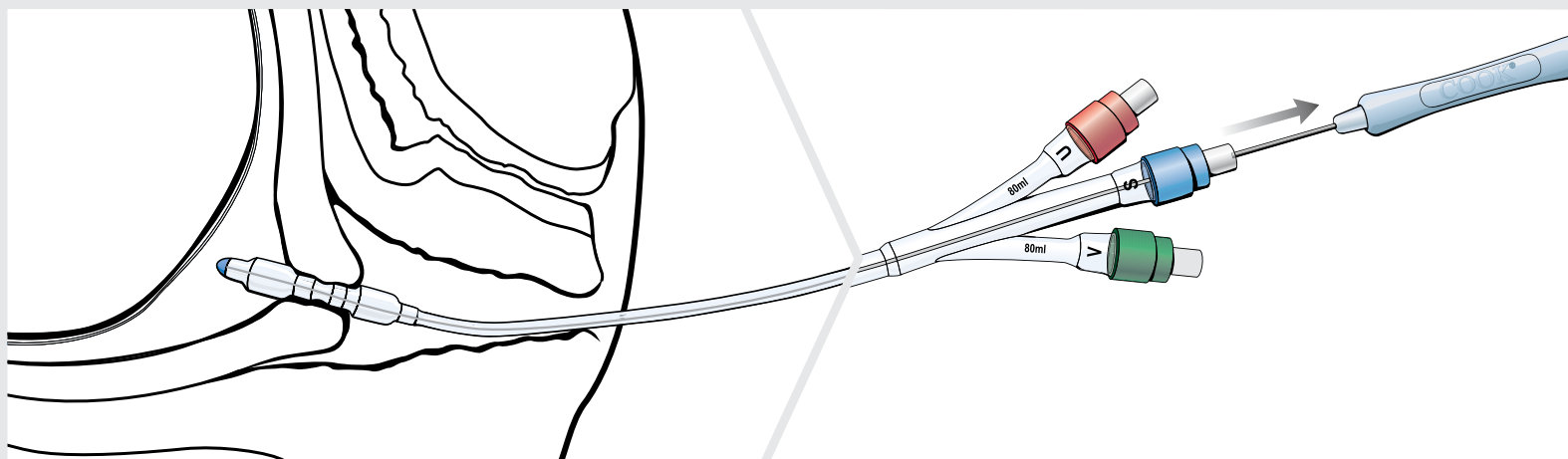

- 2** 使用带有针芯的宫颈扩张球囊穿过宫颈。
备注：当穿过宫颈并且子宫球囊高于子宫内开口（内口）的水平后，在进一步推送导管之前取出针芯。

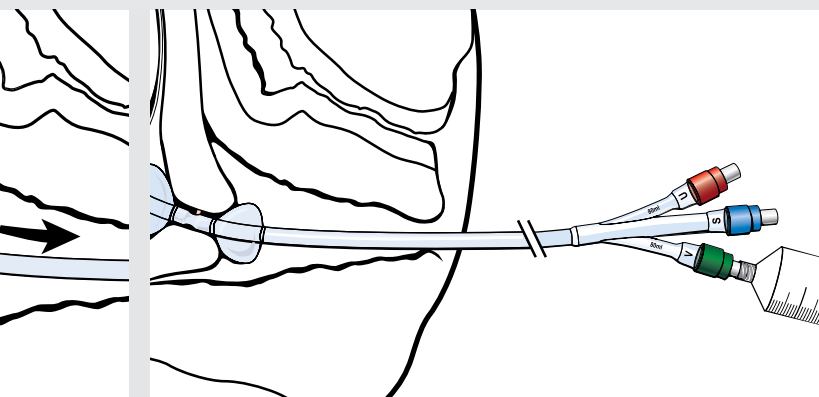


- 5** 此时在宫颈外口外应可见到阴道球囊。以 20 ml 无菌生理盐水充盈阴道球囊。

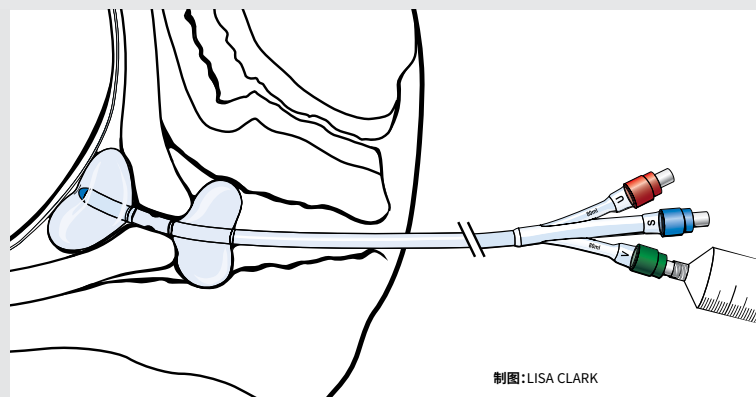

制图：LISA CLARK

- 6** 一旦两只球囊分别位于宫颈两侧之后，器械就被固定到位，继续轮流往各球囊内加液，直至每只球囊内液体抵达 80 ml（最大量）。器械在体内留置期不得超过 12 个小时。器械放置时间应安排在计划引产前 12 个小时。

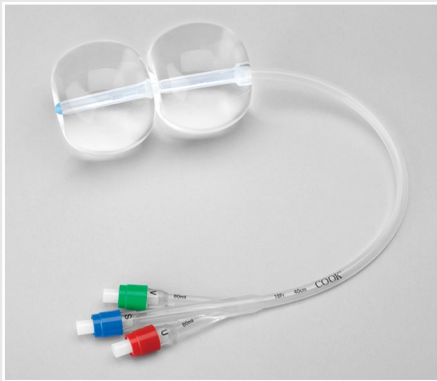


子宫颈扩张球囊

带可调式针芯

库克子宫颈扩张球囊是一种硅胶双球囊导管，带有一根可调节的针芯。适用于足月引产前宫颈不宜进行引产时进行宫颈管机械扩张。

订货号码	产品型号	外径 Fr	长度 cm	球囊容量 mL
G19891	J-CRBS-184000	18	40	80

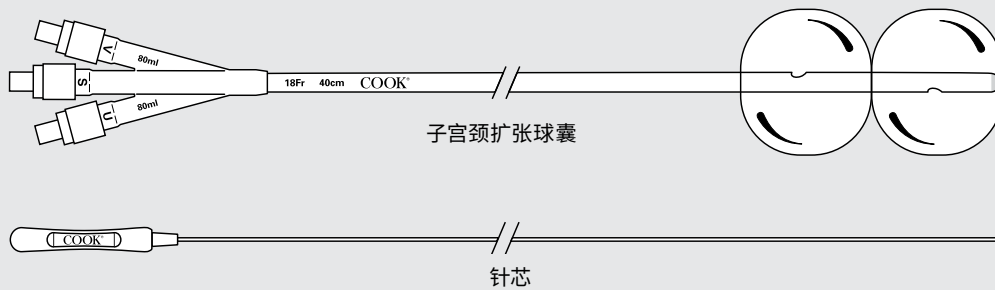

产品名称：子宫颈扩张球囊

生产企业名称：Cook Incorporated 库克公司

注册证号：国械注进 20162182261

广告批准文号：沪械广审(文)第260206-37481号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn