


ECHOTIP® Ultra

支气管超声活检针¹


系统准备 1

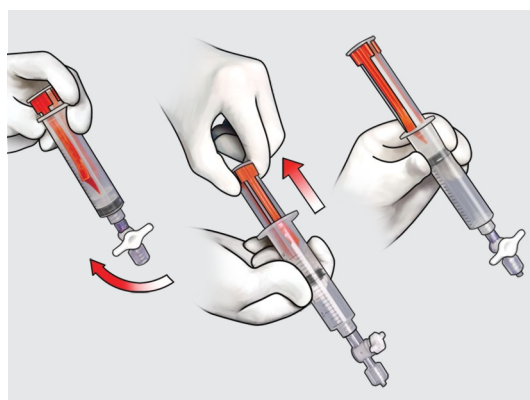

可选步骤 - 如果要使用注射器收集细胞

准备注射器时, 打开两通接头, 按下容量控制卡, 将容量控制卡推到底。关闭两通接头。回抽容量控制卡, 使其卡在预定位置, 形成负压。


系统准备 2

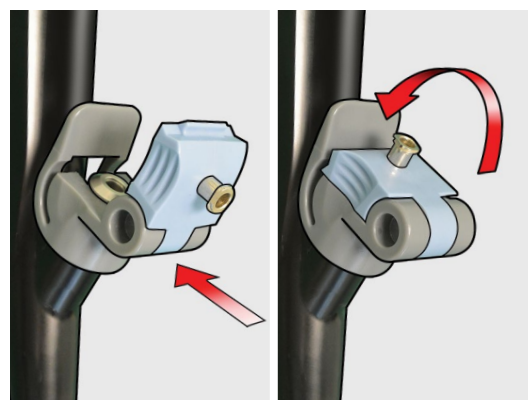

仅适用于奥林巴斯内镜用户


打开内窥镜适配器, 将其推至工作通道上, 操作时务必使适配器的底座位于工作通道金属座的下方。闭合适配器, 确认其锁定牢固。

步骤 1

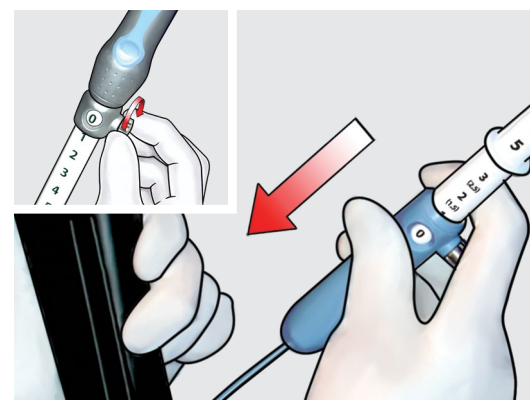


识别目标病变区域。将活检针导入内镜之前, 先确保针头被完全收回到鞘管内。针长调节钮观察窗刻度为0。将外鞘管持续推入内镜工作通道, 直到手柄前端抵达内镜工作通道孔接头, 将外鞘管调节器上的鲁尔接头与内镜工作通道孔的螺纹鲁尔接头旋接牢固。

步骤 2

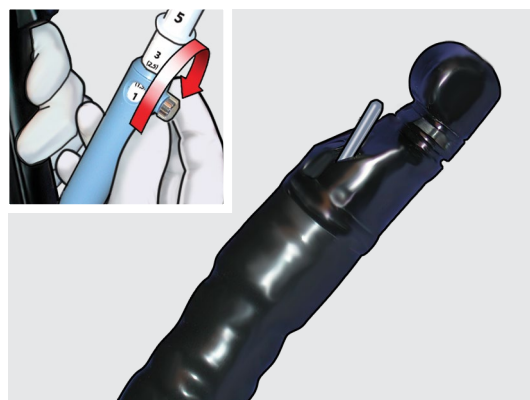


调整外鞘管至理想的长度, 直至其从内镜工作通道中伸出。

步骤 3

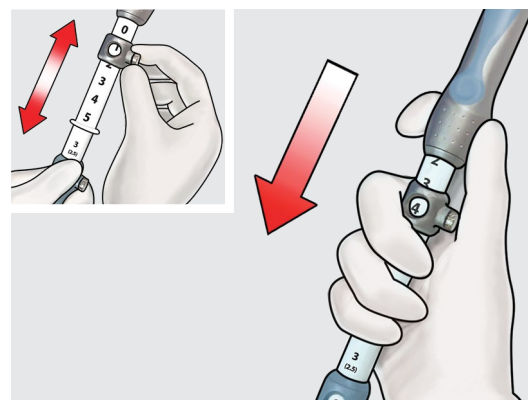

旋松针长调节旋钮, 将其滑动至预定的针长刻度, 然后旋紧旋钮, 推进手柄将针刺入病变。


步骤 4

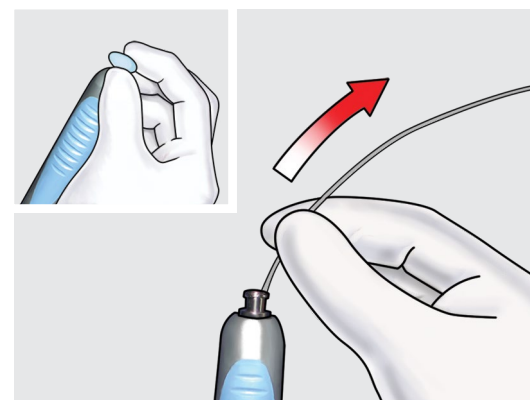

收集细胞时可使用标准的负压抽吸技术, 或者自行选择其他的带针芯或不带针芯的负压抽吸技术。轻拉手柄末端底座取出针芯。针芯完全抽出后妥善放置, 备后续多次进针收集细胞时再用。如果使用负压注射器收集细胞, 请参考步骤5。


¹产品名称: 支气管超声活检针 Echotip Endobronchial High Definition Ultrasound Needle

步骤 5

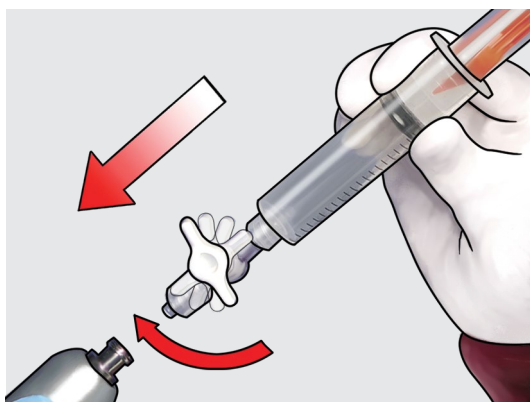


将注射器旋接在手柄末端的螺纹鲁尔接头上,打开两通接头以抽吸细胞。驱动活检针手柄往复运动,使针头在病变范围内做往复提插,完毕后关闭两通接头。

步骤 6

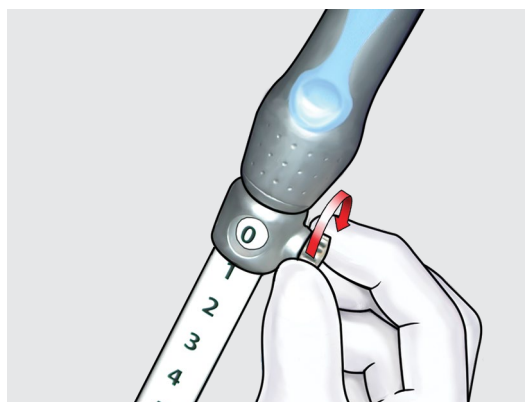

将活检针完全收回到外鞘管内,并将针长调节旋钮锁定在0刻度。


步骤 7

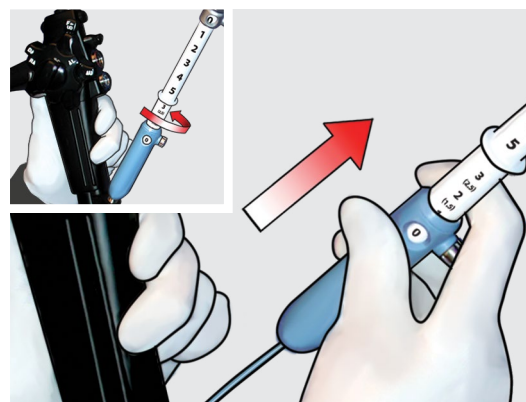

要将活检针从内镜工作通道退出,先逆时针旋松手柄上的螺纹鲁尔接头,将整个器械从内镜取出。

Pentax内镜用户可有一个额外选择,在需要多次进针取样的情况下,可以旋松外鞘调节旋钮,将活检针取下,保留外鞘调节器在内镜工作通道孔上。具体操作请参考使用说明书。


步骤 8

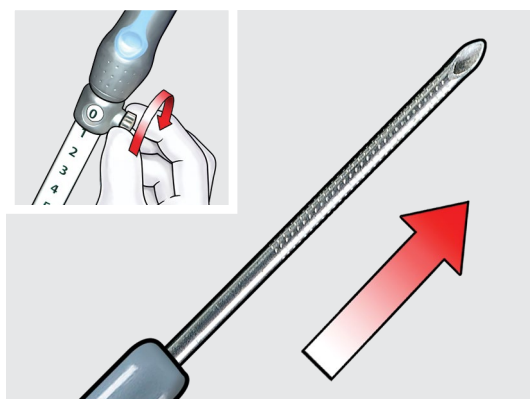

旋松针长调节旋钮,将针头伸出外鞘管。使用空的注射器或者针芯将针管内所取的样本推出。根据相关规程处理推出的样本。

如需获取更多的活检样本,请重复步骤1-8。

步骤 9

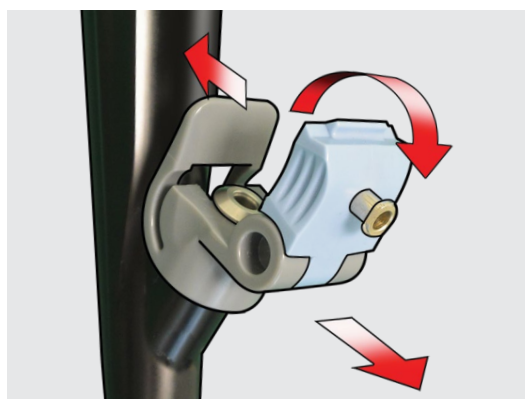

仅适用于奥林巴斯内镜用户

完成取样后,要将适配器取下,将锁夹向后拉,掀起适配器的顶盖,然后从内镜下卸下。

更详细的说明,请参考产品随附的使用说明书。

产品名称: 支气管超声活检针

生产企业名称: Cook Ireland Limited 库克爱尔兰有限公司

注册证号: 国械注进 20152022593

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com