


Soehendra


碎石器¹

步骤一

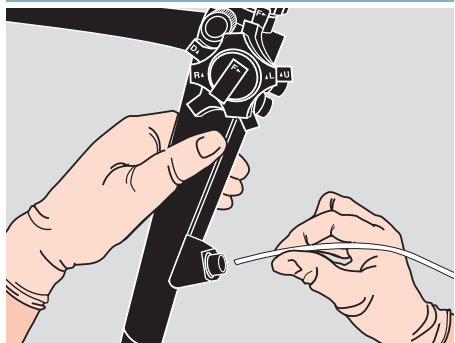


在网篮完全收回到鞘管内的状态下，将库克的软丝网篮送入内镜的活检钳道。检查网篮的产品标签，确认网篮是否具备碎石性能。

步骤二

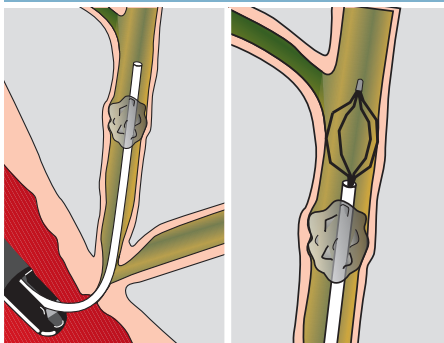


荧光透视下推送网篮的外鞘管前进并越过目标结石，然后推动手柄使网篮伸出。

步骤三

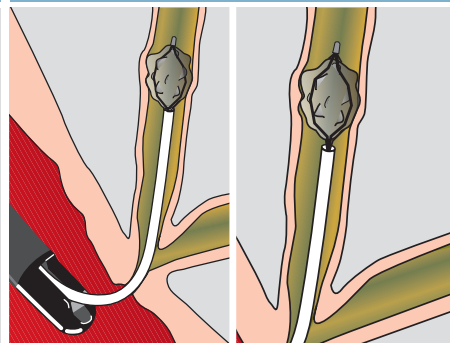


将网篮套住结石，然后缓慢收紧网篮，直至将结石牢牢捕获。

步骤四

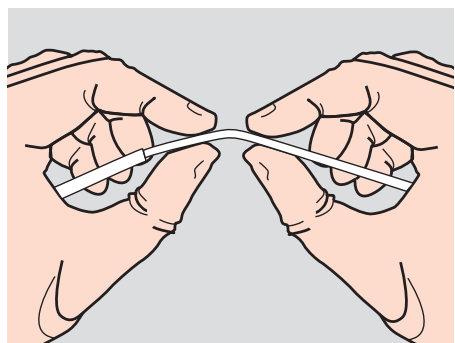


在手柄与加强外鞘下面轻轻弯曲网篮金属丝与网篮外鞘。

步骤五

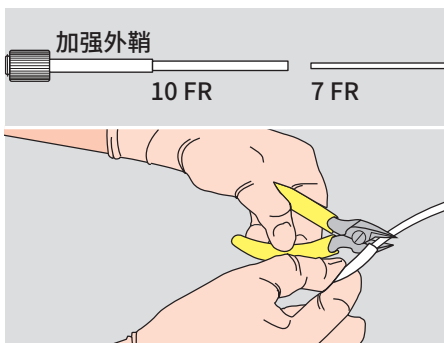

使用剪线钳(不包含在产品内)将网篮的手柄在10FR的加强鞘以外的位置和弯折的位置之间剪除。注意：不要移除7FR的网篮外鞘管。这样做可能导致网篮丝散开进而导致需要额外的外科手术介入。


步骤六

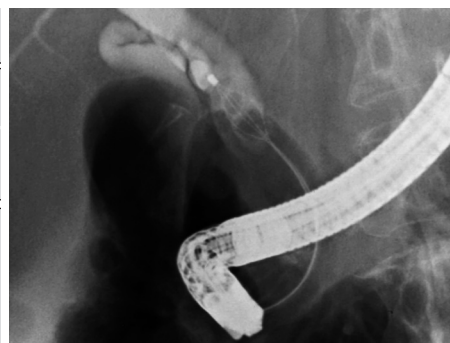

荧光透视下监视网篮和结石的状况，同时缓慢退出内镜。


产品名称¹: 机械碎石/取石辅件
Extraction devices/Mechanical Lithotriptors

步骤七

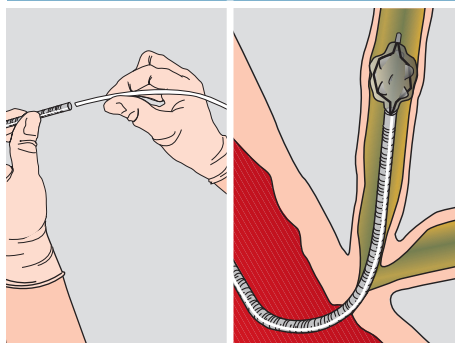


沿着剪断的网篮外鞘管，轻轻地导入 Soehendra 碎石线缆，直至线缆头端抵达胆管内的网篮和结石位置。

步骤八

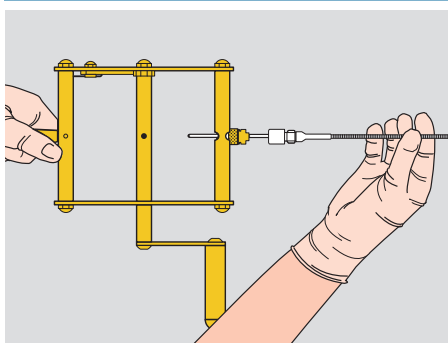


将网篮丝和外鞘管一同穿过碎石器手柄的外螺纹接口，然后继续穿过碎石器旋转杆上的小孔。

步骤九

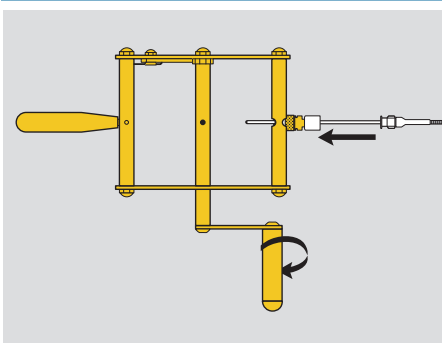


将网篮丝和外鞘管缠绕在碎石器旋转杆上数圈，使其缠绕牢固。旋转碎石器摇臂直至网篮丝缠紧、碎石线缆与手柄螺纹口相接并旋紧。

步骤十

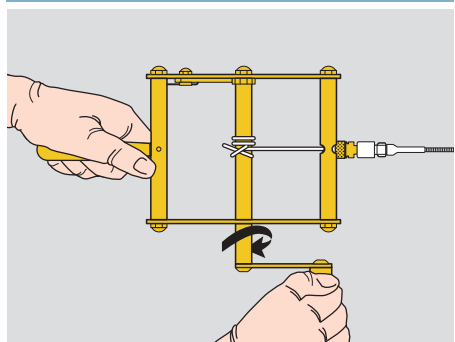

碎石时，缓慢旋转手柄加压使结石碎裂。注意：除非释放防逆转齿轮，否则手柄只能朝一个方向转动。警告：如果网篮断裂，可能需要外科手术。

步骤十一

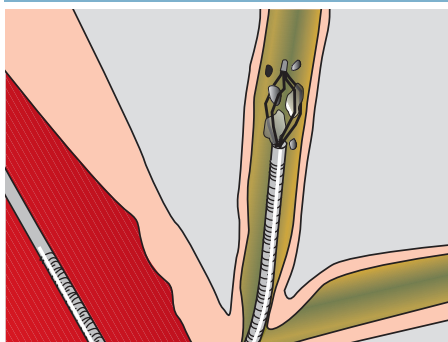

在结石粉碎之后，评估是否需要从胆道中取出碎化的结石。松开碎石器手柄上的防逆转齿轮，取出网篮。清洁并整理好 Soehendra 碎石器手柄和碎石线缆，以备后续使用。

请参考现行版的产品使用说明书获取更详细的操作说明。

产品名称：机械碎石/取石辅件

生产企业名称：Wilson-Cook Medical Incorporated 威尔逊-库克医学公司

注册证号：国械注进20162022262

广告批准文号：沪械广审（文）第250216-00066号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克（中国）医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编：200030
电话：+86-21-5451-9599
电邮：chinacsupport@cookmedical.com