

# 防止碎石术过程中 结石移位



N-Trap™

拦截网篮<sup>1</sup>

产品名称<sup>1</sup>: 拦截网篮 N-Trap Stone Entrapment and Extraction Device



# N-Trap™

拦截网篮<sup>1</sup>

本品用于内窥镜下捕获和取出泌尿道结石。

## 特性

---

### 伞状网篮设计

N-Trap 网篮由多重金属丝精密编制而成, 在体内碎石过程中可以防止大部分细小碎石的移位。

---

### 可拆式手柄

手柄可以于网篮展开的状态下拆除。将内镜从鞘的工作通道中移除, 有利于冲水效果。

---

### 软性鞘管


145cm 的长度有利于快速地操作内镜。

---


### 网篮材质

采用镍钛合金制造。

---

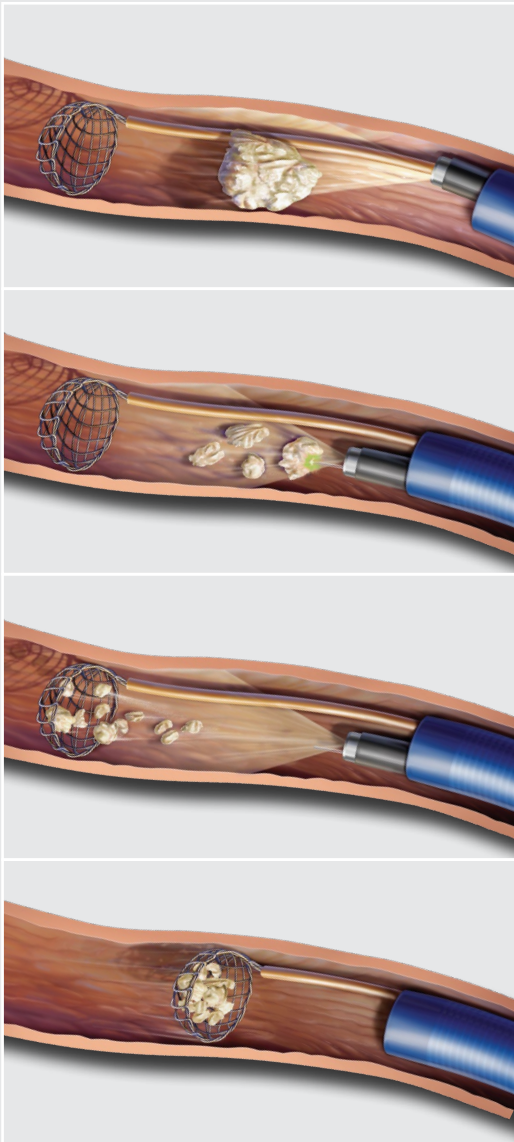

1. 将 N-Trap 拦截网篮保持在外鞘内, 在直视或透视控制下, 将 N-Trap 外鞘推送至超过结石或异物, 然后将外鞘固定在其原位, 只推送手柄来打开网篮。
2. 在碎石过程中, 结石与网篮之间必须保持至少保留 1cm 间隙, 以防损坏网篮。
3. 以 N-Trap 拦截网篮聚集结石, 防止大部分细小碎石的移位。
4. 将控制手柄固定在其原位同时把外鞘往前推。此时或许需要轻力推送网篮来释放挂在上面的结石碎片, 操作便告完成。

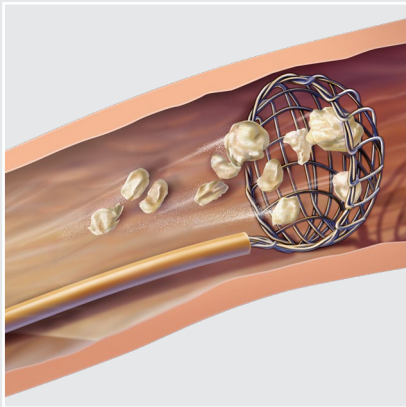

## N-Trap™

拦截网篮<sup>1</sup>

订货号码	产品型号	导入鞘 最大外径 Fr	总长度 cm	网篮 直径/形状
G32724	NTP-028145	2.91	145	7mm伞状设计

产品名称<sup>1</sup>: 拦截网篮 N-Trap Stone Entrapment and Extraction Device  
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated  
注册证号: 国械注进 20162021198  
广告批准文号: 沪械广审(文)第251014-57300号  
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司  
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室  
邮编: 200030  
电话: +86-21-5451-9599  
电邮: chinacssupport@cookmedical.com  
cookmedical.com.cn