


# 通路护航

输尿管通路的双重保护方案

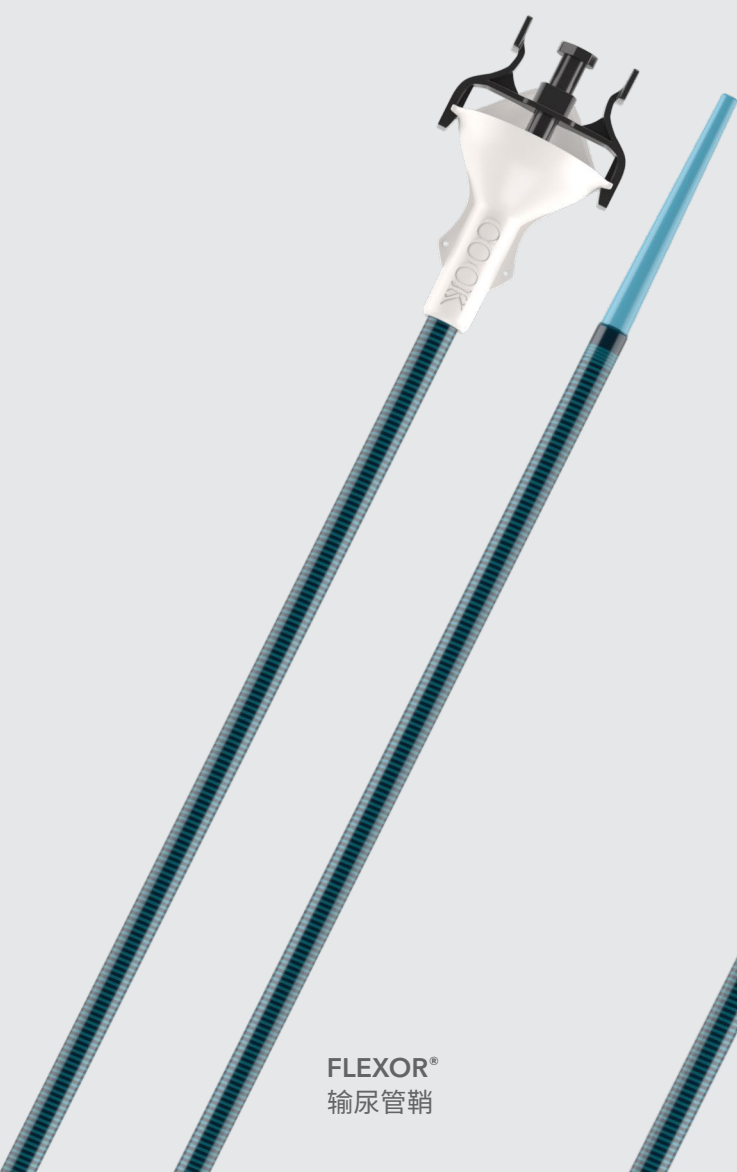


FLEXOR®  
输尿管鞘



FLEXOR® Parallel™  
Rapid Release™  
一次性使用并行导丝输尿管导引鞘

**FLEXOR® 系列输尿管导引鞘设计融合多项功能特性。产品中加入了防止扭结和挤压的加强弹簧圈，并涂覆了亲水涂层，以便轻松放置。**

Flexor

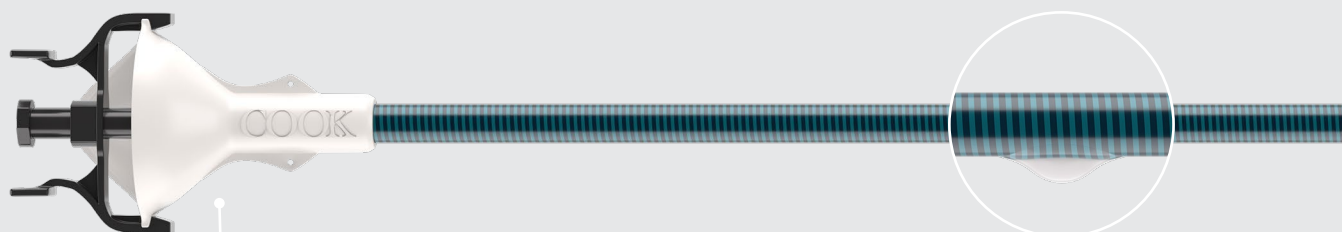

**扩张管座**


导引鞘扩张器座的锁扣机制，将扩张器固定在鞘管上，以同步推送导引鞘和扩张器。

**鞘管座**

鞘管座在置入过程中可充当手柄。上面的凹槽方便仪器的引入。

**亲水涂层**

鞘管外表面和扩张器尖端均涂覆了亲水涂层，有效降低了表面摩擦力，方便置入。

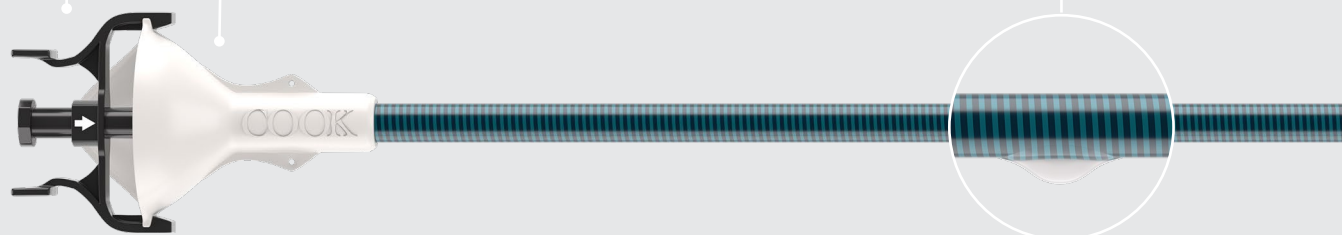


Flexor Parallel

## 标准导引鞘

Flexor 输尿管导引鞘主要用于泌尿外科内窥镜手术，目的是建立通道，方便内窥镜和其他器械进入泌尿道。导引鞘的工作通道可以在反复更换仪器时保护输尿管，并防止精密仪器和较小的输尿管软镜受损。

## 升级版本

我们在设计 Flexor Parallel Rapid Release 输尿管导引鞘时，为保护输尿管通路做了双重升级。Flexor Parallel 导引鞘有两种放置选择：传统的 Flexor 放置法和快速释放技术。快速释放技术旨在节省手术时间并减少耗材使用，这主要是因为一根导丝就可以充当并行导丝。在泌尿外科内窥镜手术中，并行导丝指的是导丝可以与输尿管导引鞘并行放置，导丝保持在工作通道之外，从而保证了通道的畅通无阻。

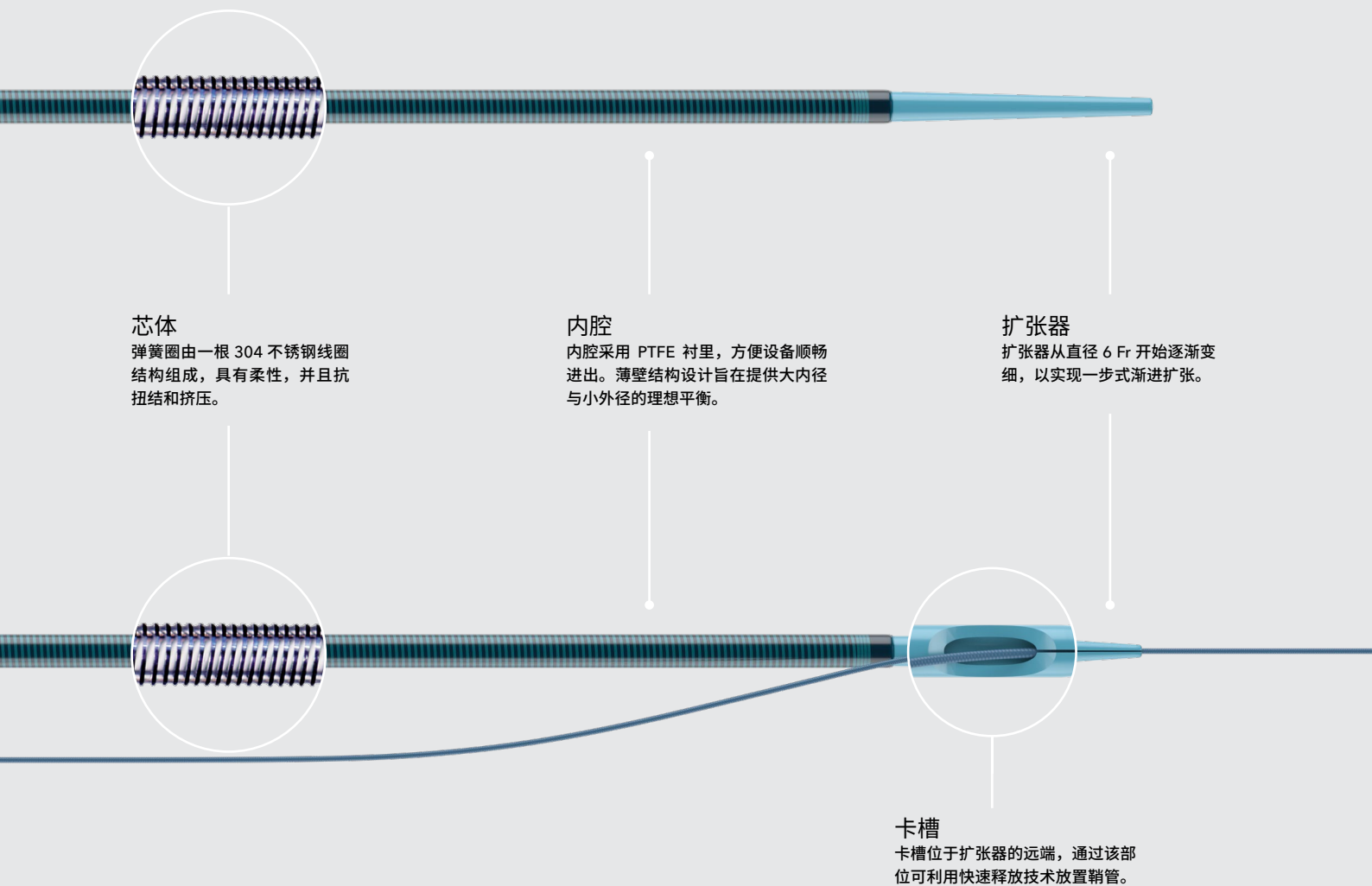

# FLEXOR®

输尿管鞘

订货号码	产品型号	鞘管内径 <sup>1</sup> Fr	鞘管有效 长度 cm	订货号码	产品型号	鞘管内径 <sup>1</sup> Fr	鞘管有效 长度 cm
G19177	FUS-095020	9.5	20	G34879	FUS-107035	10.7	35
G19176	FUS-095028	9.5	28	G34880	FUS-107045	10.7	45
G19174	FUS-095035	9.5	35	G34881	FUS-107055	10.7	55
G46167	FUS-095045	9.5	45	G19168	FUS-120035	12	35
G34876	FUS-107013*	10.7	13	G46168	FUS-120045	12	45
G34877	FUS-107020	10.7	20	G30389	FUS-140035	14	35
G34878	FUS-107028	10.7	28	G46169	FUS-140045	14	45

部分产品型号可能未在所有市场销售。有关详细信息，请咨询当地库克代表或客户支持与配送中心。

\* 两岁或以上小儿手术用。

# FLEXOR® Parallel™

RAPID RELEASE™ 一次性使用并行导丝输尿管导引鞘

订货号码	产品型号	鞘管内径 <sup>1</sup> Fr	鞘管长度 cm	订货号码	产品型号	鞘管内径 <sup>1</sup> Fr	鞘管长度 cm
G56428	FUS-095020-P	9.5	20	G56433	FUS-120020-P	12	20
G56429	FUS-095028-P	9.5	28	G56434	FUS-120028-P	12	28
G56430	FUS-095035-P	9.5	35	G56435	FUS-120035-P	12	35
G56431	FUS-095045-P	9.5	45	G56436	FUS-120045-P	12	45
G56432	FUS-095055-P	9.5	55	G56438	FUS-120055-P	12	55
G34871	FUS-107020-P	10.7	20	G56439	FUS-140020-P	14	20
G34872	FUS-107028-P	10.7	28	G56440	FUS-140028-P	14	28
G34873	FUS-107035-P	10.7	35	G56441	FUS-140035-P	14	35
G34874	FUS-107045-P	10.7	45	G56442	FUS-140045-P	14	45
G34875	FUS-107055-P	10.7	55	G56443	FUS-140055-P	14	55

部分产品型号可能未在所有市场销售。有关详细信息，请咨询当地库克代表或客户支持与配送中心。

<sup>1</sup> 鞘管内径的对应尺寸：

- 9.5 Fr 对应为 3.150 毫米（即 0.124 英寸）
- 10.7 Fr 对应为 3.556 毫米（即 0.140 英寸）
- 12 Fr 对应为 4.064 毫米（即 0.160 英寸）
- 14 Fr 对应为 4.775 毫米（即 0.188 英寸）

产品名称：一次性使用并行导丝输尿管导引鞘 FLEXOR® Parallel™ Rapid Release™ Ureteral Access Sheath

生产企业名称：库克公司 Cook Incorporated

注册证号：国械注进 20242020237

产品名称：输尿管鞘 FLEXOR® Ureteral Access Sheath

生产企业名称：库克公司 Cook Incorporated

注册证号：国械注进 20162024498

广告批准文号：沪械广审(文)第 260314-80197 号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司  
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室  
邮编: 200030  
电话: +86-21-5451-9599  
电邮: chinacssupport@cookmedical.com  
cookmedical.com.cn